

Inställningar - STAN S41

En möjlighet att välja de inställningar som passar dig i ditt dagliga arbete med STAN S41.
Vänligen bocka i/skriv din valda inställning.

Sjukhus:

Namn:

Yrke:

Datum:

Namn på inställning

Maskinnamn

Beskrivning

Tre bokstäver, används som prefix vid benämning av registreringar.

Alternativ

Ex. Neoventa **Medical** har 3 system, NMA, NMB, NMC

Maskin 1:.....

Maskin 4:.....

Maskin 2:.....

Maskin 5:.....

Maskin 3:.....

Maskin 6:.....

Färgtema för skärm

Färgtema som används för skärmen.

Svart	Grön	Rosa
-------	------	------

Villkor för ljudlarmsignal

Anger vilka prioriterade larmvillkor som bör generera en ljudlarmsignal.

Ljud av	Hög	Hög & Medelhög	Hög, medelhög & låg
---------	-----	----------------	---------------------

Larmvolym

Ljudnivå på ljudlarm.

1	2	3	4
---	---	---	---

Timeout meny

Tid av inaktivitet innan skärmen återställs till standardvärde, i sekunder. Intervallet är mellan 10 till 60 sekunder i steg om 2.

Sekunder av inaktivitet: Sek	Av
------------------------------------	----

Tangentljud

Om ljudfeedback ska genereras vid användning av touchtangenter och kontrollratten.

På	Av
----	----

Inaktivera larm

Användaren får utföra ändringar i larmsystemet under registreringen.

Inga ändringar	Ändra tröskelvärden	Alla ändringar
----------------	---------------------	----------------

Skriv ut MHF-trend

Om mamma-hjärtfrekvensen ska skrivas ut som en kurva i utskriften.

På	Av
----	----

Utskrift Paus

Om utskrift skall pausas efter ett antal minuter eller av (kontinuerlig utskrift)

10	20	30	40	50	60	120	off
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Namn på inställning	Beskrivning	Alternativ									
Skriv ut trendvärde	Tidsintervall för utskrift av mammans parametervärden i utskriften, i minuter.	<table><tr><td>Av</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr></table>	Av	5	10	15	20	30	40	50	60
Av	5	10	15	20	30	40	50	60			
Skriv ut FEKG-medelvärde	Om och hur ofta kurvor över FEKG-medelvärde ska skrivas ut.	<table><tr><td>Av</td><td>2 min</td><td>4 min</td><td>5 min</td></tr></table>	Av	2 min	4 min	5 min					
Av	2 min	4 min	5 min								
Färg på FHF-rutnät	Definierar bakgrundsfärger för CTG-rutnätet på skärmen.	<table><tr><td>NICE 1999/ BJOG 2007</td><td>FIGO 1992/ NICE 2007</td><td>FIGO 2015</td><td>SFOG 2017</td></tr></table>	NICE 1999/ BJOG 2007	FIGO 1992/ NICE 2007	FIGO 2015	SFOG 2017					
NICE 1999/ BJOG 2007	FIGO 1992/ NICE 2007	FIGO 2015	SFOG 2017								
FHF-Linjeseperation	Definierar om FHF2 och FHF3 ska visas med -20 respektive +20 spm offset på skärmen och i utskrift.	<table><tr><td>Av</td><td>FHF2 +20, FHF3 -20</td></tr></table>	Av	FHF2 +20, FHF3 -20							
Av	FHF2 +20, FHF3 -20										
Ultraljud volym	Tröskelvärde för ljudvolym för hörbar respons från ultraljudsgivare. Välj av eller 1 till 16.	<table><tr><td>Av</td><td>Ljudvolym:.....</td></tr></table>	Av	Ljudvolym:.....							
Av	Ljudvolym:.....										
Visa MAP	Visa MAP-värdet av NIBP värden på skärm och utskrift.	<table><tr><td>Ja</td><td>Nej</td></tr></table>	Ja	Nej							
Ja	Nej										
Fosterlarm	Definierar om larmsignaler ska genereras för hög/låg foster-hjärtfrekvens för FHF1 och FEKG.	<table><tr><td>På</td><td>Av</td></tr></table>	På	Av							
På	Av										
Larm vid fränkopplad givare	Definierar om larmsignaler ska genereras när FHF- och TOKO-givare fränkopplas.	<table><tr><td>På</td><td>Av</td></tr></table>	På	Av							
På	Av										
Tröskelvärde för Hög FHF-larm	Tröskelvärde för nivåalarm Hög FHF (spm). Välj ett värde mellan 111 till 210.	<table><tr><td>Värde:.....</td><td>Av</td></tr></table>	Värde:.....	Av							
Värde:.....	Av										
Tröskelvärde för Låg FHF-larm	Tröskelvärde för nivåalarm Låg FHF (spm). Välj ett värde mellan 50 till 159.	<table><tr><td>Värde:.....</td><td>off</td></tr></table>	Värde:.....	off							
Värde:.....	off										
Fördröjning FHF-larm (s)	Tidsfördröjning för generering av nivåalarm Hög/Låg FHF (sekunder). Välj ett värde mellan 0 till 300 i steg om 5.	<table><tr><td>Värde:.....</td><td>off</td></tr></table>	Värde:.....	off							
Värde:.....	off										
TOKO-känslighet	Förstärkningsnivå (relativa enheter)	<table><tr><td>50%</td><td>100%</td><td>200%</td></tr></table>	50%	100%	200%						
50%	100%	200%									
TOKO baslinjenivå	Baslinjenivå som tillämpas efter ”Nollställ TOKO”.	<table><tr><td>0</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr></table>	0	5	10	15	20				
0	5	10	15	20							

Namn på inställning	Beskrivning	Alternativ		
Larm vid frånkopplad givare	Definierar om larmsignaler ska genereras när FEKG- och IUP-givare fränkopplas.	<table><tr><td>På</td><td>Av</td></tr></table>	På	Av
På	Av			
FEKG ljudvolym	Tröskelvärde för ljudvolym för hörbar respons från FEKG hjärtfrekvensgivare. Välj av eller en ljudnivå från 1 till 16.	<table><tr><td>Av</td><td>Ljudvolym:.....</td></tr></table>	Av	Ljudvolym:.....
Av	Ljudvolym:.....			
Ljudfeedback för hjärtslag	Standardläge för aktivering av generering av ljudfeedback för hjärtslag som detekteras med FEKG.	<table><tr><td>På</td><td>Av</td></tr></table>	På	Av
På	Av			
MEKG-larm	Om nivåalarm ska genereras för MHF som beräknats från MEKG-signalen.	<table><tr><td>På</td><td>Av</td></tr></table>	På	Av
På	Av			

Namn på inställning	Beskrivning	Alternativ	
Tröskelvärde för Hög MHF-larm	Övre tröskelvärde för larm för MEKG-nivåalarm för HF. Välj ett värde mellan 16 till 300.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg MHF-larm	Nedre tröskelvärde för larm för MEKG-nivåalarm för HF. Välj ett värde mellan 15 till 299.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Hög Resp-larm	Övre tröskelvärde för larm för Resp-nivåalarm. Välj ett värde mellan 1 till 150.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg Resp-larm	Nedre tröskelvärde för Resp-nivåalarm. Välj ett värde mellan 0 till 149.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg MSpO2-larm	Nedre tröskelvärde för larm för nivåalarm för MSpO2-syrgasmättnad. Välj ett värde mellan 0 till 99.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Hög MP-larm	Övre tröskelvärde för larm för nivåalarm för MSpO2-puls-frekvens. Välj ett värde mellan 0 till 99.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg MP-larm	Nedre tröskelvärde för larm för nivåalarm för MSpO2-puls-frekvens. Välj ett värde mellan 15 till 299.	Värde:.....	Av
Nivåalarm SYS	Om nivåalarm för NIBP ska genereras baserat på systoliskt tryck (SYS).	På	Av
Tröskelvärde för Hög SYS-larm	Övre tröskelvärde för larm för systoliskt NIBP-nivåalarm. Välj ett värde mellan 41 till 280.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg SYS-larm	Nedre tröskelvärde för larm för systoliskt NIBP-nivåalarm. Välj ett värde mellan 40 till 279.	Värde:.....	Av
Nivåalarm DIA	Om nivåalarm för NIBP ska genereras baserat på diastoliskt tryck (DIA).	På	Av
Tröskelvärde för Hög DIA-larm	Övre tröskelvärde för larm för diastoliskt NIBP-nivåalarm. Välj ett värde mellan 11 till 210.	Värde:.....	Av
Tröskelvärde för Låg DIA-larm	Nedre tröskelvärde för larm för diastoliskt NIBP-nivåalarm. Välj ett värde mellan 10 till 219.	Värde:.....	Av