


# Verkorte handleiding

Deze Verkorte handleiding is geen vervanging voor de Gebruiksaanwijzing.

## Een registratie starten

Druk op de inschakeltoets.

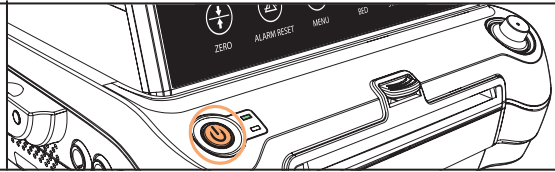

Houd de "START/STOP"-toets ingedrukt om registraties te starten, stoppen en pauzeren.

Druk op de toets "PRINT" om te starten en te stoppen met afdrukken. Achteraf afdrukken is mogelijk.



ZERO



ALARM RESET



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Druk op de toets "ALARM RESET" om lopende alarmen te bevestigen.

Houd de toets "MENU" een paar seconden ingedrukt om het aanraakscherm te vergrendelen/ontgrendelen.

## Uitwendige registratie - TOCO

Plaats de TOCO boven de fundus.

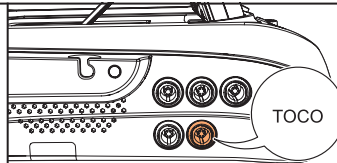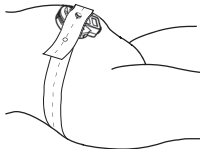

Sluit de TOCO-transducer aan op de SRF618 B6.




ZERO

Om het TOCO-signaal te resetten, drukt u tussen de weëën in op de "ZERO" aanraaktoets.


## Uitwendige registratie - Ultrasound



Breng ultrasoundgel aan op de ultrasound-transducer.

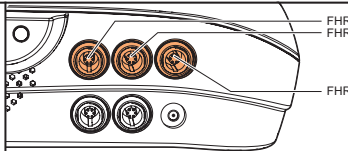



Sluit de Ultrasound-transducers aan op de SRF618 B6.

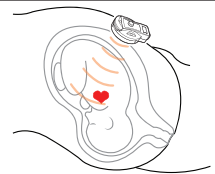


Plaats de transducer op de buik van de moeder.

## Foetale-bewegingsknop

Foetale-bewegingsknop met snoer

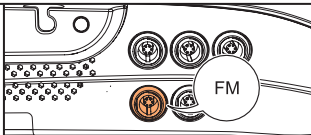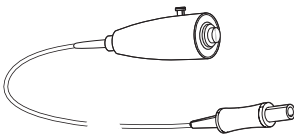

Sluit het snoer van de foetale-bewegingsknop aan op de SRF618 B6.

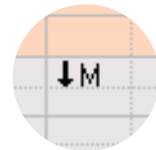

Foetale-bewegingsknop op het scherm.

# Het apparaat bedienen

Het eventlogboek openen

Toets Menu Extra

Menu snelinstellingen

Door het CTG-venster bladeren

Snelinstellingen. De instellingen in het dialoogvenster snelinstellingen zijn alleen van toepassing op de huidige registratie.

Druk op de aanraaktoets "BED". Het scherm snelinstellingen wordt weergegeven.

OF

Selecteer "Menu snelinstellingen"

Toegang tot instellingen met het menu "Extra".

Eventlogboek-venster. Voor het toevoegen en beoordelen van alarmsituaties en aantekeningen.

Om de resultaten van automatische CTG-analyse te beoordelen, drukt u op "Analyseresultaat" in het menu Extra.

Om patiëntgegevens in te voeren, drukt u op "Patiëntgegevens" in het menu Extra.



**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 People's Republic of China, Postcode: 510520  
 Tel: +86-20-87036513  
 Website: www.sunray.cn

**Verkoop, Neoventa Medical AB**  
 Service  
 en Assistentie  
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Zweden  
 Tel: +46 31 758 32 00  
 Website: www.neoventa.com  
**Technische assistentie**  
 Tel: +46 31 758 32 12  
 E-mail: ts@neoventa.com

