


Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

Aufzeichnung starten

Drücken Sie den Netzschalter

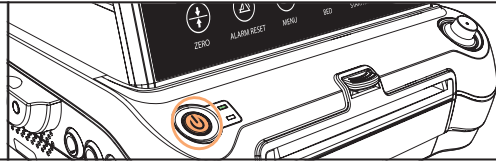

Halten Sie die „START / STOP“ - Taste gedrückt, um eine Aufnahme zu starten und zu stoppen oder anzuhalten.

Drücken Sie die „PRINT“- Taste, um einen Druckvorgang zu starten bzw. zu beenden. Rückwirkendes Drücken ist möglich.





Drücken Sie die „ALARM RESET“-Taste, um die laufenden Alarme zu bestätigen.

Halten Sie die „MENU“-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um den Touchscreen zu sperren/zum entsperren.

Externe Aufzeichnung – TOKO

Positionieren Sie TOKO über dem Fundus

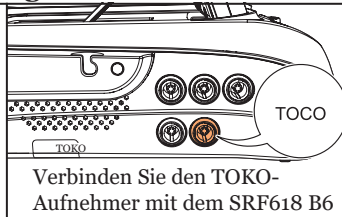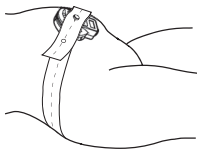


Verbinden Sie den TOKO-Aufnehmer mit dem SRF618 B6



Um den TOKO auf Null zu stellen, betätigen Sie die „ZERO“-Taste während einer Wehenpause

Externe Aufzeichnung – Ultraschall

Tragen Sie Ultraschallgel auf den Ultraschallaufnehmer auf

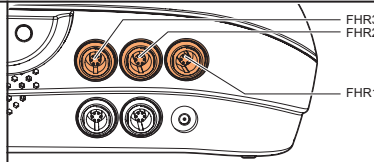



Verbinden Sie den Ultraschall-aufnehmer mit dem SRF618 B6




Suchen Sie die Herzfrequenz des Kindes und positionieren Sie den Ultraschallaufnehmer auf dem mütterlichen Bauch

Marker für Ereignisse/Kindsbewegungen

Drahtgebundener Marker für Ereignisse/ Kindsbewegungen

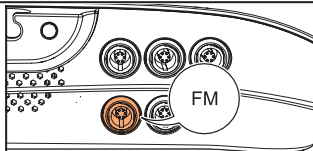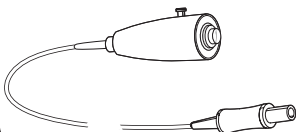


Verbinden Sie den Marker für Ereignisse/Kindsbewegungen mit dem SRF618 B6

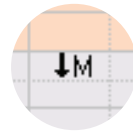

Darstellung des Ereignisses/der manuellen Kindsbewegung auf dem Bildschirm

Bedienung des gerätes

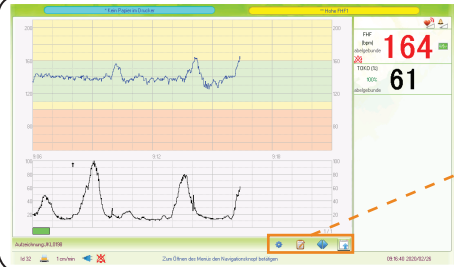


Öffnen des Ereignisprotokolls

Menüschnittfläche Extras

Menü Schnelleinstellungen

Scrollen im CTG-Fenster


Schnelleinstellungen. Die im Dialogfenster „Schnelleinstellungen“ vorgenommenen Einstellungen gelten nur für die aktuelle Aufzeichnung.

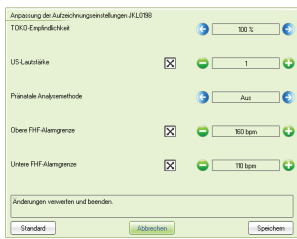


Drücken Sie die Funktionstaste „BED“. Der Bildschirm Schnelleinstellungen wird angezeigt.

ODER


Wählen Sie „Schnelleinstellungenmenü“.




Der Zugriff auf die Einstellungen erfolgt über das Menü „Extras“.

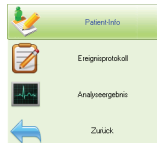

Fenster: Ereignisprotokoll Zum Hinzufügen von Anmerkungen/ Ereignissen & zur Überprüfung von Alarmsituationen

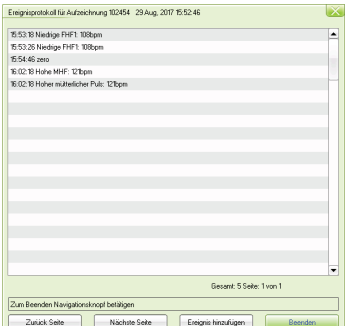


Um die Ergebnisse der automatisierten CTG-Analyse zu überprüfen, wählen Sie „Analyseergebnis“ im Menü Extras aus

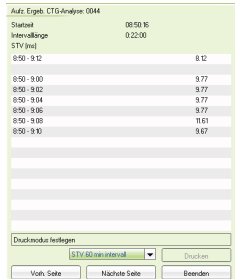

Aufz. Ergeb. CTG-Analyse 0044	Startzeit	08:50:15
Intervalllänge	0:22:00	
8:50 - 9:12	8:12	
8:50 - 9:00	9:77	
8:50 - 9:02	9:77	
8:50 - 9:04	9:77	
8:50 - 9:06	9:77	
8:50 - 9:08	11:61	
8:50 - 9:10	9:67	

Um Patienteninformationen einzugeben, wählen Sie „Patienteninformationen“ im Menü Extras aus.

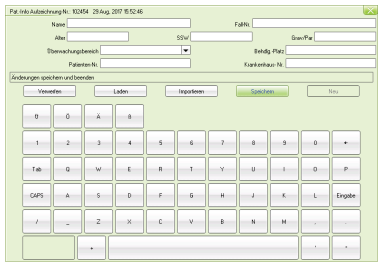

CE 0123 **Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.** **Verkauf, Service und Support** **Neoventa Medical AB**

38 Gaoko Road, Gaotang Industry District, GuangShanEr Road, Guangzhou, VR China
 Tel.: +86-20-87036513
 Website: www.sunray.cn

Norra Ägatan 32, SE-431 35 Mölndal, Schweden
 Tel.: +46 31 758 32 00
 Website: www.neoventa.com
Technischer Support
 Tel.: +46 31 758 32 12
 E-Mail: ts@neoventa.com