

# Guida rapida

Questa guida rapida non sostituisce le istruzioni per l'uso.

## Avvio di una registrazione

Premere il pulsante di accensione.



Tenere premuto il tasto "START/STOP" per avviare, interrompere o sospendere registrazioni.

Premere il tasto "PRINT" per avviare o interrompere la stampa. È possibile la stampa retrospettiva.



ZERO



ALARM RESET



MENU



BED



START/STOP




PRINT

Premere il tasto "ALARM RESET" per confermare gli allarmi in corso.

Premere e tenere premuto il tasto "MENU" per alcuni secondi per bloccare/sbloccare il touch screen.

## Registrazione esterna - TOCO

Posizionare il trasduttore TOCO in corrispondenza del fondo uterino.

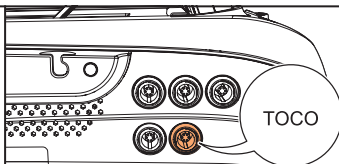

Collegare il trasduttore TOCO al monitor SRF618 B6.




ZERO

Per azzerare il segnale TOCO, premere il tasto a sfioramento "ZERO" tra una contrazione e l'altra.


## Registrazione esterna - Ultrasuoni



Applicare l'apposito gel al trasduttore a ultrasuoni.

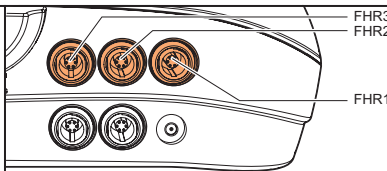



Collegare i trasduttori a ultrasuoni al monitor SRF618 B6.

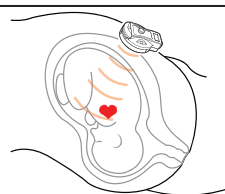

Posizionare il trasduttore sull'addome materno.

## Marcatore dei movimenti fetali

Marcatore dei movimenti fetali con fili.

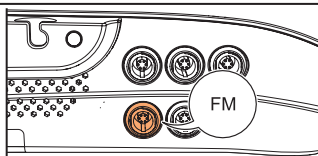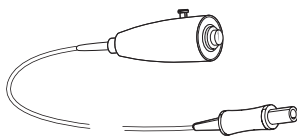


Collegare il marcatore dei movimenti fetali con fili al monitor SRF618 B6.



Indicazione del movimento fetale sullo schermo.

# Utilizzo del dispositivo

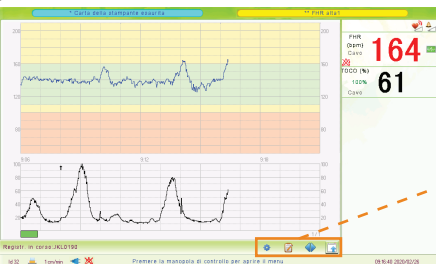


Apertura del registro degli eventi

Pulsante del menu Strumenti

Menu delle impostazioni rapide

Scorrimento della finestra CTG

Impostazioni rapide. Le impostazioni eseguite nella finestra di dialogo delle impostazioni rapide sono applicate solo alla registrazione corrente.

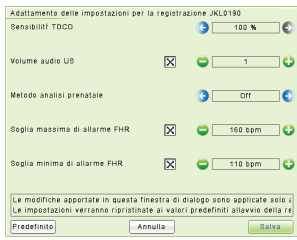

Adattamento delle impostazioni per la registrazione -JKL0190

Sensibilità TOCO: 100 %

Volume audio US: 1

Metodo analisi prenatale: Off

Soglia massima di allarme FHR: 160 bpm

Soglia minima di allarme FHR: 110 bpm


Le modifiche apportate in questa finestra di dialogo sono applicate solo il. Le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti all'avvio della r

Predefinito Annulla Salva


Premere il tasto a sfioramento "BED". Viene visualizzata la schermata delle impostazioni rapide.

O


Selezionare "Menu impostazioni rapide".



Accedere alle impostazioni utilizzando il menu "Strumenti".



Finestra del registro degli eventi. Per aggiungere ed esaminare le condizioni di allarme e le annotazioni.

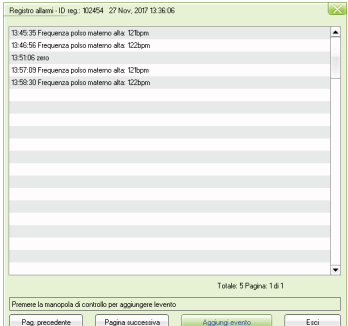

Registro allarmi - ID reg.: 102454 27 Nov, 2017 13:36:06


13:45:35 Frequenza polso materno alta 12bpm  
13:46:56 Frequenza polso materno alta 122bpm  
13:51:06 zero  
13:57:09 Frequenza polso materno alta 12bpm  
13:58:30 Frequenza polso materno alta 12bpm

Totale: 5 Pagina: 1 di 1

Premere la manopola di controllo per aggiungere evento

Pag. precedente Pagina successiva Aggiung. evento Esci

Per esaminare i risultati dell'analisi CTG automatica, premere "Risultato analisi" nel menu Strumenti.

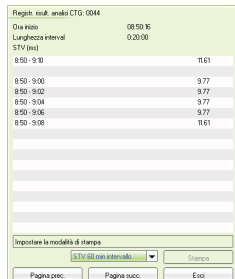

Risultato analisi CTG: 0044

Data inizio: 08:03:16  
Lunghezza interval: 0:20:00


STV (ms)	
8:50 - 9:10	1161
8:50 - 9:00	9:77
8:50 - 9:02	9:77
8:50 - 9:04	9:77
8:50 - 9:06	9:77
8:50 - 9:08	1161

Importare la modalità di stampa

STV da cui interval: Stampa

Pagina prec. Pagina succ. Esci

Per immettere le informazioni sulla paziente, premere "Informazioni sulla paziente" nel menu Strumenti.

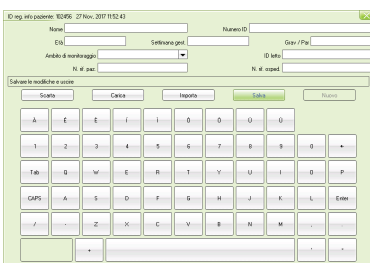

ID reg. informazioni: 102456 27 Nov, 2017 13:43:43

Nome: \_\_\_\_\_ NumeroID: \_\_\_\_\_

Cod: \_\_\_\_\_ Sesso: \_\_\_\_\_ Grv / Ppl: \_\_\_\_\_

Ambio di monitoraggio: \_\_\_\_\_ ID letto: \_\_\_\_\_

N. di sac: \_\_\_\_\_ N. di ospiti: \_\_\_\_\_

Seleziona le modalità di stampa

Stampa: \_\_\_\_\_ Cinesia: \_\_\_\_\_ Nuova: \_\_\_\_\_ Salva: \_\_\_\_\_ Ritorno: \_\_\_\_\_

Grid: A E I L O U

Grid: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Grid: Tab: B W E R T Y U I O P

Grid: CAPS: A S D F G H J K L Enter

Grid: Z X C V B N M



**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
GuangShanEr Road, Guangzhou,  
Repubblica Popolare Cinese, Codice postale: 510520  
Tel: +86-20-87036513  
Sito web: www.sunray.cn

**Supporto,  
Assistenza e  
Vendite**

**Neoventa Medical AB**  
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Svezia  
Tel: +46 31 758 32 00  
Sito Internet: www.neoventa.com  
**Assistenza tecnica**  
Tel: +46 31 758 32 12  
E-mail: ts@neoventa.com

