


# Guía rápida

La presente guía rápida no reemplaza las instrucciones de uso.

## Inicio de un registro

Pulse el botón de encendido.

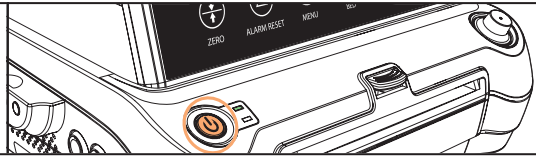

Pulse y mantenga presionada la tecla “START/STOP” para iniciar y detener o pausar los registros.

Presione la tecla “PRINT” para iniciar y detener la impresión. Es posible la impresión retrospectiva.



ZERO



ALARM RESET



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Presione la tecla “ALARM RESET” para confirmar las alarmas en curso.

Mantenga presionada la tecla “MENU” durante unos segundos para bloquear o desbloquear la pantalla táctil.

## Registro externo - TOCO

Coloque el TOCO sobre el fondo uterino.

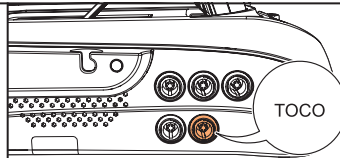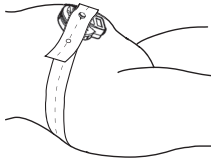

Conecte el transductor TOCO a SRF618 B6.




ZERO

Para poner a cero la señal TOCO, pulse la tecla táctil “ZERO” entre contracciones.

## Registro externo - Ultrasonido



Ponga gel para ultrasonidos en el transductor ultrasónico.

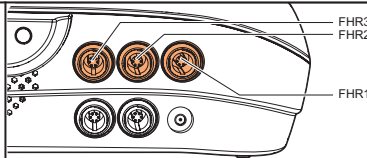



Conecte los transductores ultrasónicos a SRF618 B6.




Coloque el transductor en el abdomen materno.

## Marcador de movimientos fetales

Marcador de movimientos fetales con cable.

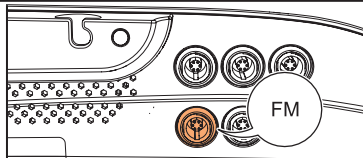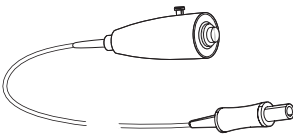


Conecte el marcador de movimientos fetales con cable a SRF618 B6.

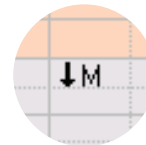

Marca de movimientos fetales en la pantalla.

# Uso del dispositivo

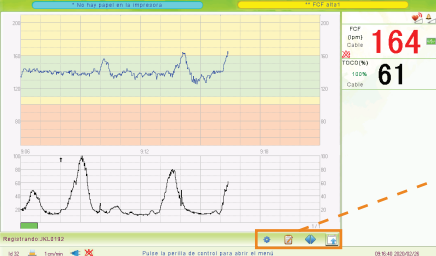


Uso del registro de eventos

Botón de menú de herramientas

Menú de ajustes rápidos

Ventana de desplazamiento por CTG

Ajustes rápidos. Los ajustes realizados en el cuadro de diálogo de ajustes rápidos solo se aplican al registro actual.

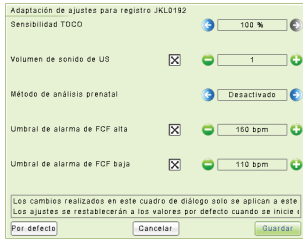

Adaptación de ajustes para registro JKL192

Sensibilidad TOCO 100 %

Volumen de sonido de US 1

Método de análisis prenatal Desactivado

Umbral de alarma de FCF alta 160 bpm

Umbral de alarma de FCF baja 110 bpm


Los cambios realizados en este cuadro de diálogo solo se aplican a este. Los ajustes se restablecerán a los valores por defecto cuando se inicie el Pali-defecto

Cancelar Opciones


Pulse la tecla táctil "BED". Aparecerá la pantalla de ajustes rápidos.

Y

Seleccione "Menú de ajustes rápidos".



Acceda a la configuración con el menú "Herramientas".

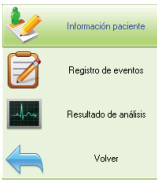


Información paciente

Registro de eventos

Resultado de análisis

Volver

Ventana de registro de eventos. Para añadir y revisar condiciones y anotaciones de alarmas.

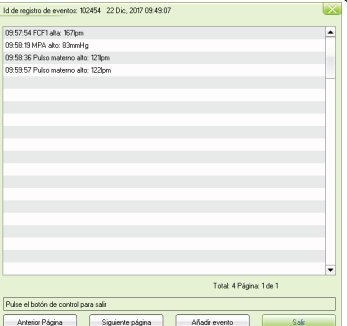

Id de registro de eventos: 102454 22 Dic. 2017 09:49:07

09:57:54 FCF alto: 167bpm

09:58:19 MPA alto: 83mmHg

09:58:36 Pulso materno alto: 123bpm


09:59:57 Pulso materno alto: 123bpm

Total: 4 Páginas 1 de 1

Pulse el botón de control para salir

Anterior Página Siguiente página Añadir evento Salir

Para revisar los resultados del análisis de CTG automatizado, pulse "Resultado de análisis" en el menú de herramientas.

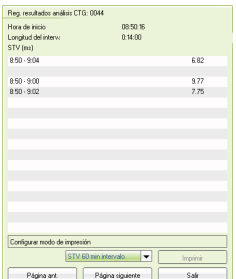

Reg. resultado análisis CTG: 0044

Hora de inicio: 09:50:16

Longitud del evento: 0:16:00

STV (ms)

0:50 - 9:04	6.82
0:50 - 9:00	9.77
0:50 - 9:02	7.75


Configure modo de impresión

STV (80 ms retenido)

Imprimir

Página anterior Página siguiente Salir

Para acceder a información de la paciente, pulse "Información del paciente" en el menú de herramientas.

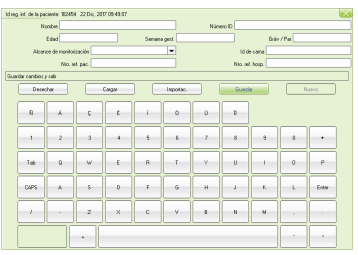

Mostrar ref. de la paciente: 102454 22 Dic. 2017 09:49:07

Nombre:

Apellido:

Alcance de notificación:

No. ref. pac.:

No. ref. hosp.:

Seleccione modo de impresión

Imprimir

Cancelar



**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 República Popular China, C.P.: 510520  
 Tel.: +86-20-87036513  
 Sitio web: www.sunray.cn

**Neoventa Medical AB**  
 Ventas, servicio y soporte  
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Suecia  
 Tel.: +46 31 758 32 00  
 Sitio web: www.neoventa.com  
**Soporte técnico**  
 Tel.: +46 31 758 32 12  
 Correo electrónico: ts@neoventa.com

