


Lynvejledning

Lynvejledningen erstatter ikke brugsanvisningen.

Start af en registrering

Tryk på tænd/sluk-knappen.

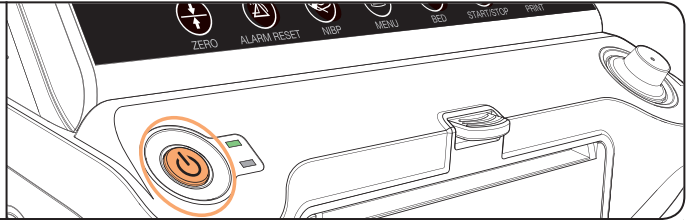

Tryk på trykknappen "START/STOP", og hold den nede for at starte, stoppe eller for at sætte en registrering på pause.

Tryk på trykknappen "PRINT" for at starte og stoppe udskrivning. Der er muligt at udskrive retrospektivt.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Tryk "ALARM RESET" for at bekræfte igangværende alarmer.

Tryk og hold "MENU" nede i et par sekunder for at låse/åbne op for berøringsskærmen.

Ekstern registrering – TOCO

Placer TOCO-transducere over fundus.

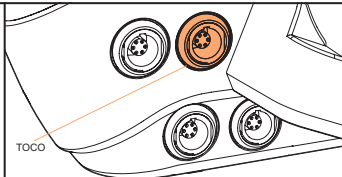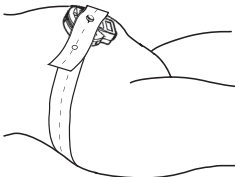

Tilslut TOCO-transducere til STAN S41.




ZERO

For at nulstille TOCO-signalet skal du trykke på knappen "ZERO" mellem kontraktionerne.

Ekstern registrering – ultralyd


Smør ultralydsgel på ultralydstransducere.

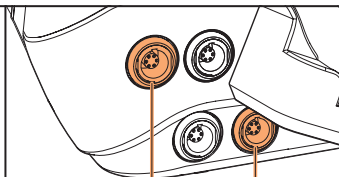

FHR1 FHR2

Tilslut ultralydstransducere til STAN S41.

Placer transducere på moderens mave.

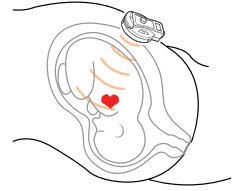

Intern registrering – foster-EKG (FEKG)

Klargør huden og påsæt hudelektroden med den fastgjorte legplate.



Placer legplate tæt på lyskekanalen.
Påsæt den føtale skalpelektrode i henhold til producentens anvisninger.






FEKG


Tilslut FEKG-stikket til STAN S41.


ST-analyse

ST-hændelse




TQR/S værdier

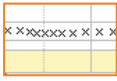

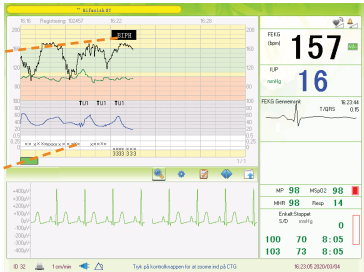



FEKG-gennemsnit

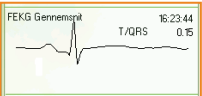


Eventmarker

Kabelbundet eventmarker

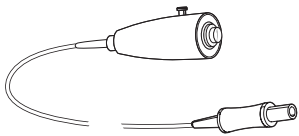

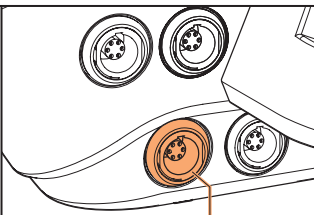


Tilslut den kabelbundne eventmarker til STAN S41.

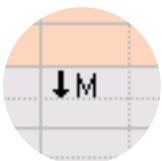


Eventmærke på skærmen

Maternel parameter – MSpO2

Sæt MSpO2-sensoren på patientens pegefinger med neglemarkeringen mod neglen.

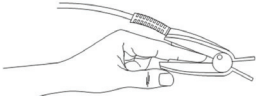


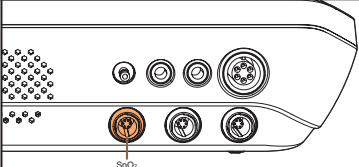


SpO2


Tilslut SpO2 til STAN S41.

MP- og MSpO2-værdier

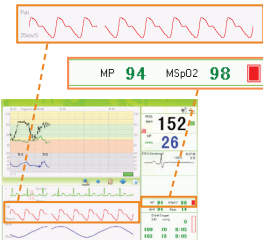


Maternelle parametre – NIBP

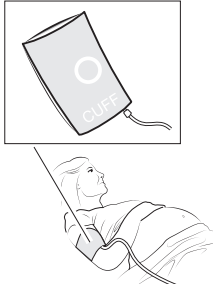

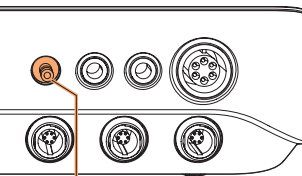

NIBP

Tilslut blodtryksmanchetten til STAN S41.



Tryk på trykknappen NIBP for at starte målingen.


NIBP-menu

Vælg metode til blodtryksmåling

Auto (2:00) Auto (5:00) Auto (10:00) Auto (15:00) Auto (30:00)


Enkelt STAT Stop tilstanden Auto Annuller


Vælg den ønskede måletilstand i genvejsmenuen.

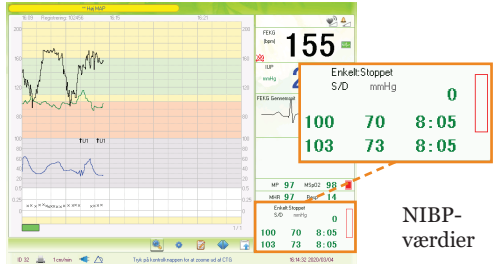


NIBP-værdier

Maternelle parametre – MEKG og vejrtrækningsfrekvens

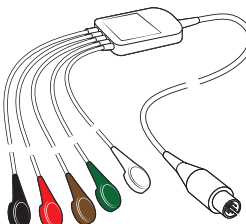

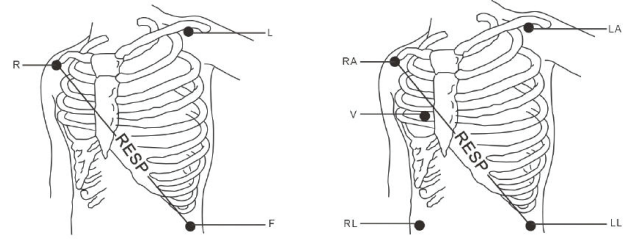


Placering af elektroder ved brug af henholdsvis 3- og 5-ledertilstand

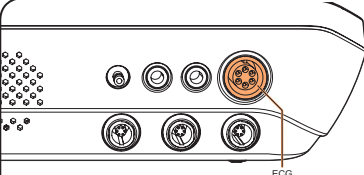


Tilslut MEKG-kablet til EKG-stikket på hovedenheden.


MEKG- og vejrtrækningsfrekvensværdier

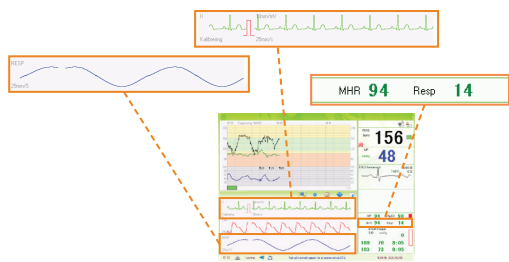


Betjening af enheden

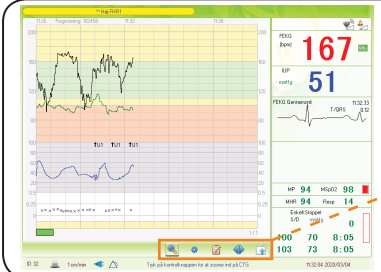


Skift
visnings-
tilstand




Åbn
hændelses-
loggen




Knappen
værktøjs-
menu

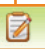

Menuen hurtige
indstillinger



Gennemrul
CTG vinduet






Hurtige indstillinger.
De indstillinger, der er foretaget i dialogboksen Hurtige indstillinger, gælder kun for den aktuelle registrering.

Tryk på trykknappen "BED". Skærmen Hurtige indstillinger vises.


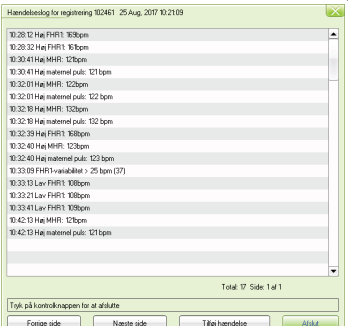
ELLER

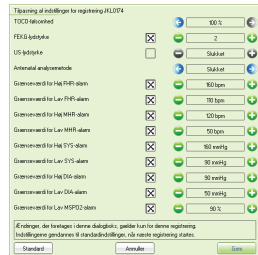Vælg "Menuen hurtige indstillinger".






Du kan få adgang til indstillingerne via værktøjsmenuen.

Vinduet Hændelseslog. Bruges til at gennemse alarmtilstande og tilføje bemærkninger.

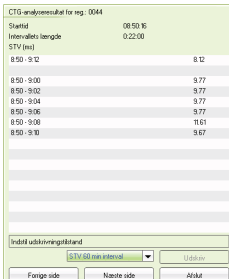



For at gennemse resultaterne af den automatiserede CTG-analyse skal du trykke på "Analyseresultat" i værktøjsmenuen.



Starttid	08:50:16
Interval (sek)	0:22:00
8:50 - 9:12	8,12
8:50 - 9:00	9,77
8:50 - 9:02	9,77
8:50 - 9:04	9,77
8:50 - 9:06	9,77
8:50 - 9:08	16,61
8:50 - 9:10	9,67

For at indtaste oplysninger om patienten skal du trykke på "Patientinformation" i værktøjsmenuen.

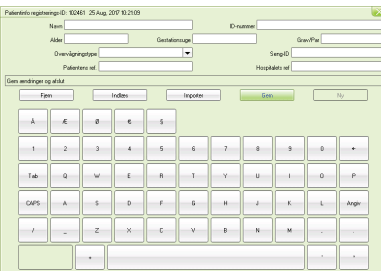


Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.
38 Gaokou Road, Gaotang Industry District,
GuangShanEr Road, Guangzhou, Kina
Postnummer: 510520
Tlf.: +86-20-87036513
Website: www.sunray.cn

**Salg,
service
og
support**

Neoventa Medical AB
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Sverige
Tlf.: +46 31 758 32 00
Website: www.neoventa.com
Teknisk support
Tlf.: +46 31 758 32 12
E-mail: ts@neoventa.com

