


Verkorte handleiding

Deze Verkorte handleiding is geen vervanging voor de Gebruiksaanwijzing.

Een registratie starten

Druk op de inschakeltoets.

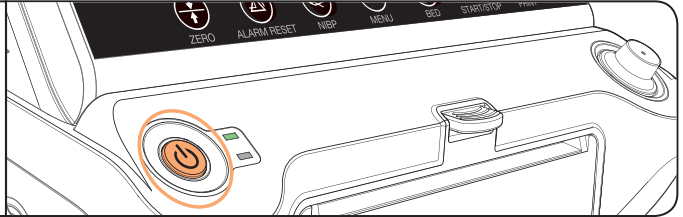

Houd de "START/STOP"-toets ingedrukt om registraties te starten, stoppen en pauzeren. Druk op de toets "PRINT" om te starten en te stoppen met afdrukken. Achteraf afdrukken is mogelijk.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Druk op de toets "ALARM RESET" om lopende alarmen te bevestigen.

Houd de toets "MENU" een paar seconden ingedrukt om het aanraakscherm te vergrendelen/ontgrendelen.

Uitwendige registratie - TOCO

Plaats de TOCO boven de fundus.

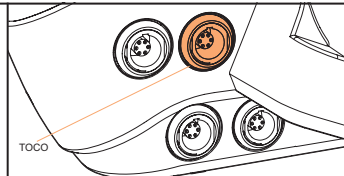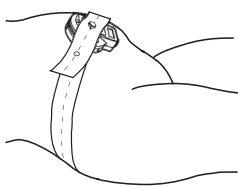

Sluit de TOCO-transducer aan op de STAN S41.




ZERO

Om het TOCO-signaal te resetten, drukt u tussen de weeën in op de "ZERO" aanraaktoets.


Uitwendige registratie - Ultrasound



Breng ultrasoundgel aan op de ultrasound-transducer.

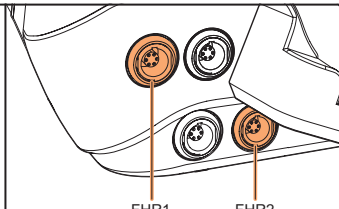


Sluit de Ultrasound-transducers aan op de STAN S41.

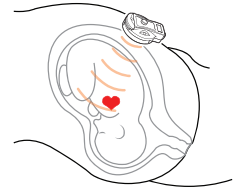

Plaats de transducer op de buik van de moeder.



Inwendige registratie - Foetaal ECG (FECG)

Prepareer de huid en breng de huidelektrode aan met de bevestigde beenplaat.

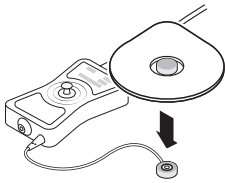

Plaats de beenplaat in de buurt van het lieskanaal.

Breng de foetale schedelelektrode aan volgens de instructies van de fabrikant.

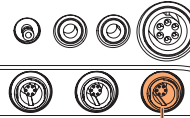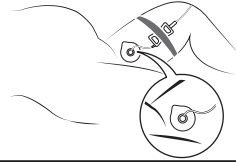

FECG



Sluit de FECG-connector aan op de STAN S41.

ST-analyse

ST-event



T/QRS-ratio's

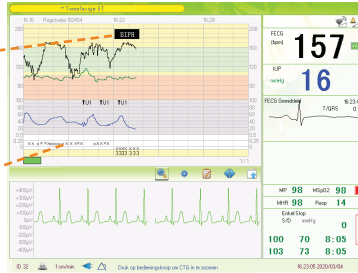
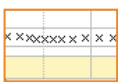


FECG Gemiddeld




Foetale-bewegingsknop

Foetale-bewegingsknop met snoer

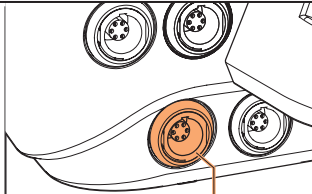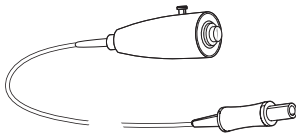



Sluit het snoer van de foetale-bewegingsknop aan op de STAN S41.

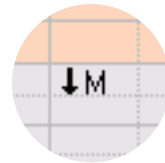

Foetale-bewegingsknop op het scherm.


Maternale parameters - MSpO2

Breng de MSpO2-sensor aan op de wijsvinger van de patiënt met de nagelmarkering naar de kant van de nagel gericht.

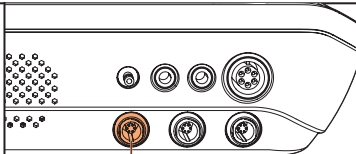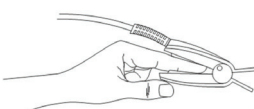


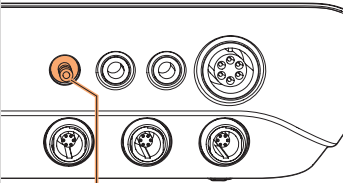
Sluit de SpO2 aan op de STAN S41.

MPR- en MSpO2-waarden.

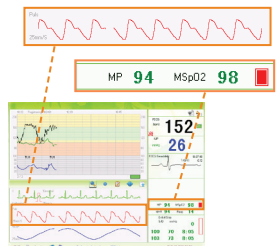


Maternale parameters - NIBP






NIBP

Sluit de NIBP-manchet aan op de STAN S41.




NIBP

Druk op de NIBP-aanraaktoets om de meting te starten.

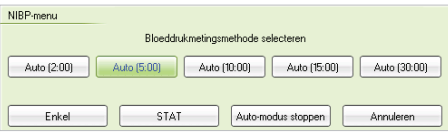


Selecteer de gewenste meetmodus in het pop-up menu.

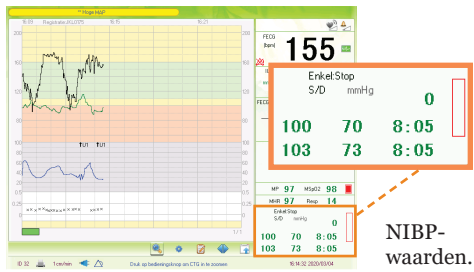


Enkel	Stop	S/D	mmHg
100	70	8:05	
103	73	8:05	


NIBP-waarden.

Maternale parameters - MEGC en ademhalingsfrequentie

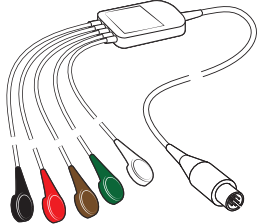

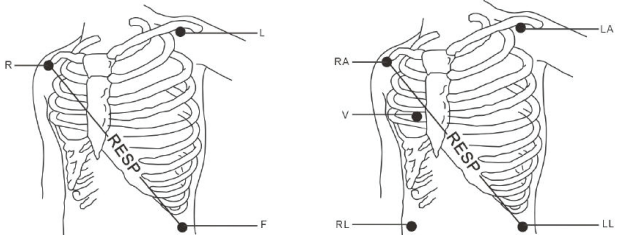


Aanbrengen van elektroden voor resp. 3- en 5-afleidingskabelmodus.

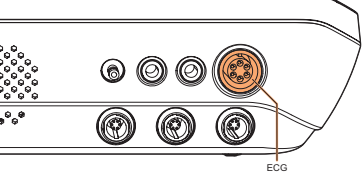


Sluit de MEGC-afleidingskabel aan op de ECG-connector van de hoofdeenheid.

MEGC- en ademhalingsfrequentiewaarden

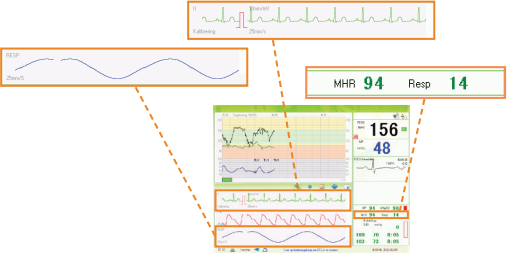

MHR	94	Resp	14
-----	----	------	----


Het apparaat bedienen

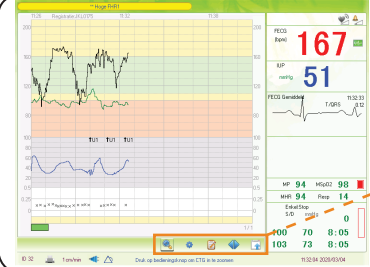

Wijzig de weergavemodus Het eventlogboek openen Toets Menu Extra

Menu snelinstellingen Door het CTG-venster bladeren


Snelinstellingen. De instellingen in het dialoogvenster snelinstellingen zijn alleen van toepassing op de huidige registratie.



Druk op de aanraaktoets "BED". Het scherm snelinstellingen wordt weergegeven.

OF

Selecteer "Menu snelinstellingen"

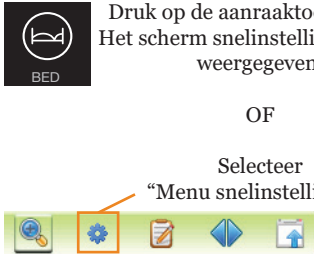


Toegang tot instellingen met het menu "Extra".




Eventlogboek-venster. Voor het toevoegen en beoordelen van alarmsituaties en aantekeningen.



Om de resultaten van automatische CTG-analyse te beoordelen, drukt u op "Analyseresultaat" in het menu Extra.

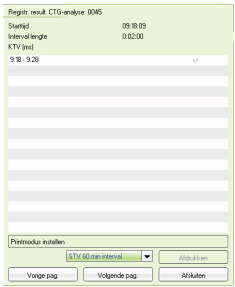

Om patiëntgegevens in te voeren, drukt u op "Patiëntgegevens" in het menu Extra.

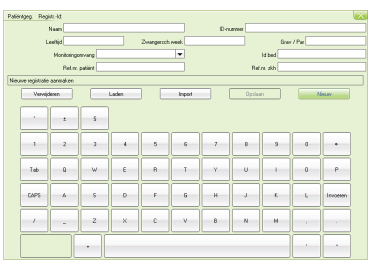


Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.
 38 Gaokou Road, Gaotang Industry District,
 GuangshanEr Road, Guangzhou,
 People's Republic of China, Postcode: 510520
 Tel: +86-20-87036513
 Website: www.sunray.cn

Verkoop, Service en Assistentie
Neoventa Medical AB
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Zweden
 Tel: +46 31 758 32 00
 Website: www.neoventa.com
Technische assistentie
 Tel: +46 31 758 32 12
 E-mail: ts@neoventa.com



STAN S41 Verkorte handleiding - P2263-11086
 Rev. CE1.4 - Mei 2020

