


## Guide de référence rapide

Ce guide de référence rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation.

### Démarrage d'un enregistrement

Appuyez sur le bouton d'alimentation.

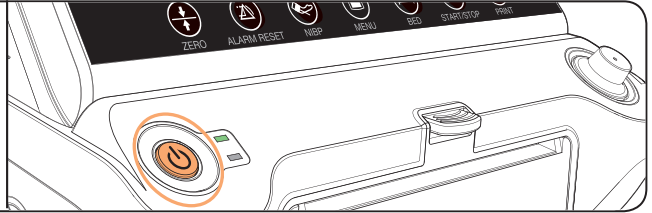

Appuyez sur la touche « START/STOP » (MARCHÉ/ARRÊT) quelques secondes pour démarrer et arrêter ou mettre en pause les enregistrements.

Appuyez sur la touche « PRINT » (IMPRIMER) pour démarrer et arrêter l'impression. L'impression rétrospective est possible.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Appuyer sur la touche « ALARM RESET » pour confirmer les alarmes en cours.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche « MENU » pendant quelques secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran tactile.

### Enregistrement externe - TOCO

Placez le capteur TOCO au-dessus du fond utérin.

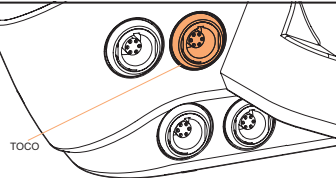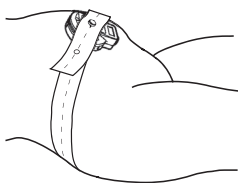

Connectez le capteur TOCO au STAN S41.




ZERO

Pour réinitialiser le signal TOCO, appuyez sur la touche tactile « ZERO » entre les contractions.

### Enregistrement externe - Capteur ultrasons




Appliquez du gel sur le capteur ultrasons.

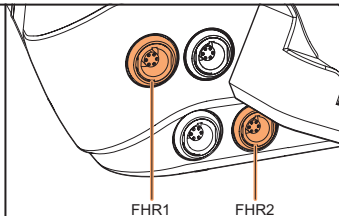

FHR1

FHR2


Connectez les capteurs ultrasons au STAN S41.

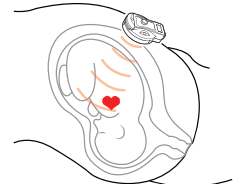


Placez le capteur sur l'abdomen de la parturiente.


# Enregistrement interne - ECG fœtal (FECG)

Préparez la peau et connecter l'électrode de peau à la plaque de jambe.

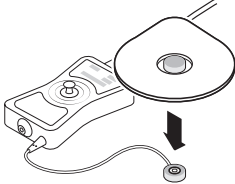

Placez la plaque de jambe près du canal inguinal. Appliquez l'électrode de scalp fœtal conformément aux instructions du fabricant.

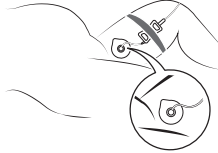

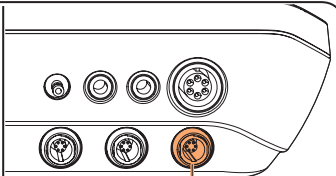


FECG


Connectez le connecteur FECG au STAN S41.


## Analyse ST

Évènement ST




Rapports TQR/S

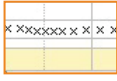

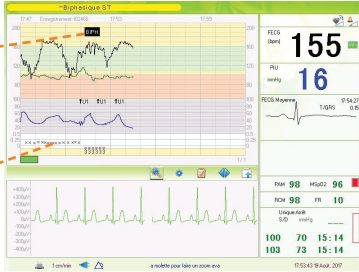



FECG Moyen



## Marqueur d'évènements


Marqueur d'évènements câblé.

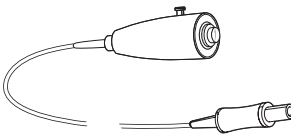

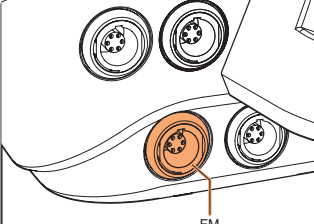

FM


Connectez le marqueur d'évènements câblé au STAN S41.

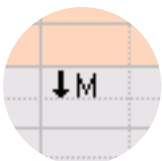


Détection automatique des mouvements du fœtus à l'écran

## Paramètre maternel - MSpO2

Placez le capteur MSpO2 sur l'index de la parturiente, avec le repère du côté de l'ongle.

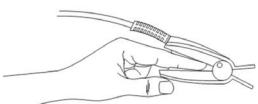


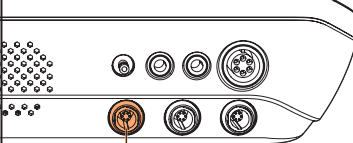


SpO2


Raccorder la SpO2 au STAN S41.

Valeurs Poulx Maternel et MSpO2.

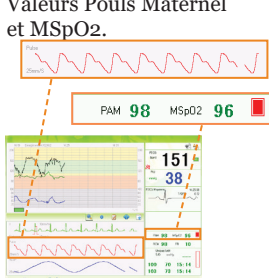


# Paramètres maternels - PNI

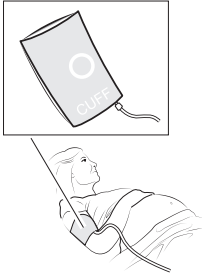

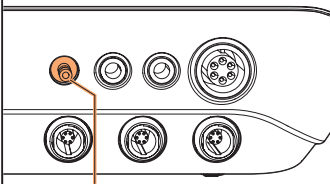

NIBP

Connectez le brassard de tension au STAN S41.



Appuyez sur la touche NIBP pour lancer la prise de tension


Menu PNI

Sélectionner le mode de mesure de la PNI

Auto (2:00)
Auto (5:00)
Auto (10:00)
Auto (15:00)
Auto (30:00)

Unique
Continus
Arrêter mode auto
Annuler


Sélectionnez le mode de mesure souhaité dans le menu contextuel.

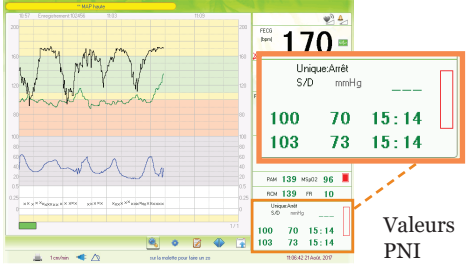


Unique/Arrêt S/D			mmHg		
100	70	15:14			
103	73	15:14			


Valeurs PNI

# Paramètres maternels - MEGC et fréquence respiratoire

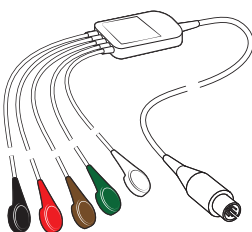

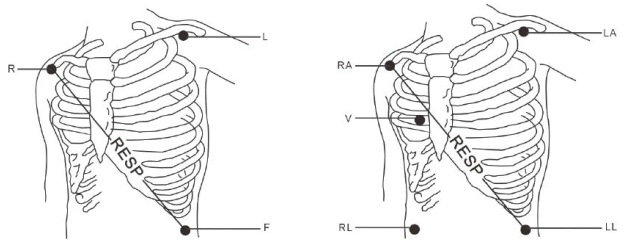


Placement des électrodes pour les modes 3 ou 5 dérivation.

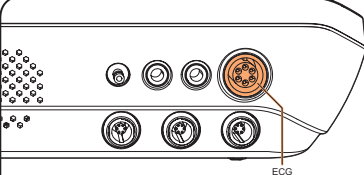

ECG

Raccordez le câble MEGC au connecteur ECG de l'unité principale.

Valeurs MEGC et fréquence respiratoire.

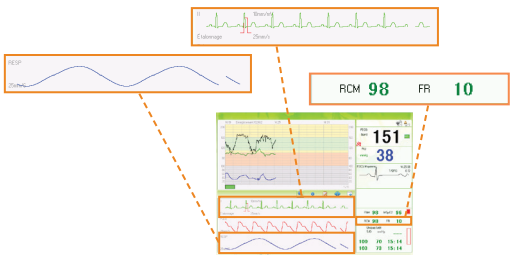

RCM	98	FR	10
-----	----	----	----

# Utilisation de l'appareil

Changer de mode d'affichage    Ouverture du journal des évènements    Bouton de menu Outils

Menu des réglages rapides    Faire défiler la fenêtre CTG

Réglages rapides. Les réglages réalisés dans la boîte de dialogue des réglages rapides s'appliquent uniquement à l'enregistrement actuel.

Appuyez sur la touche tactile « BED ». L'écran des réglages rapides s'affiche.

OU

Sélectionnez le « Menu des réglages rapides ».

Accès aux paramètres à l'aide du menu « Outils ».

Fenêtre Journal des évènements. Examiner le journal des évènements et faire des annotations.

Pour consulter les scores de l'analyse CTG automatique, appuyez sur « Score de l'analyse » dans le menu Outils.

Heure de début	Heure de fin	Score
0:00 - 0:00	0:00 - 0:00	9,77
0:00 - 0:00	0:00 - 0:00	9,77
0:00 - 0:00	0:00 - 0:00	9,77
0:00 - 0:04	0:00 - 0:04	9,77

Pour entrer les informations patient, appuyez sur « Informations patient » dans le menu Outils.



**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 République populaire de Chine, Code postal : 510520  
 Tél. : +86-20-87036513  
 Site Web : www.sunray.cn

**Ventes, service et support technique**  
**Neoventa Medical AB**  
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Suède  
 Tél. : +46 31 758 32 00  
 Site Web : www.neoventa.com  
**Support technique**  
 Tél. : +46 31 758 32 12  
 E-mail : ts@neoventa.com