


## Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.

### Aufzeichnung starten

Drücken Sie den Netzschalter.

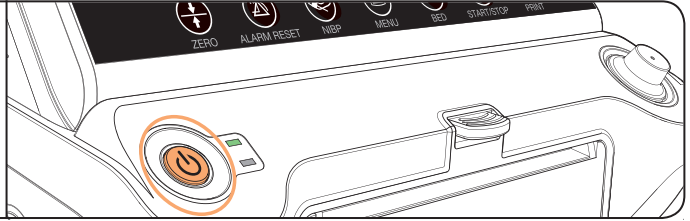

Halten Sie die „START / STOP“-Taste gedrückt, um eine Aufnahme zu starten und zu stoppen oder anzuhalten.

Drücken Sie die „PRINT“-Taste, um einen Druckvorgang zu starten bzw. zu beenden. Rückwirkendes Drücken ist möglich.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Drücken Sie die „ALARM RESET“-Taste, um die laufenden Alarme zu bestätigen.

Halten Sie die „MENU“-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um den Touchscreen zu sperren/zu entsperren.

### Externe Aufzeichnung – TOKO

Positionieren Sie TOKO über dem Fundus.

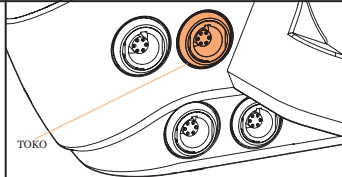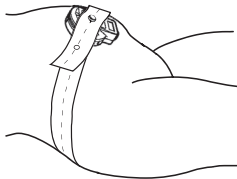

Verbinden Sie den TOKO-Aufnehmer mit dem STAN S41.




ZERO

Um den TOKO auf Null zu stellen, betätigen Sie die „ZERO“-Taste während einer Wehenpause.

### Externe Aufzeichnung – Ultraschall




Tragen Sie Ultraschallgel auf den Ultraschallaufnehmer auf.

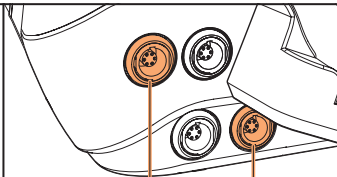

FHR1

FHR2


Verbinden Sie den Ultraschallaufnehmer mit dem STAN S41.

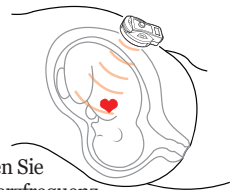


Suchen Sie die Herzfrequenz des Kindes und positionieren Sie den Ultraschallaufnehmer auf dem mütterlichen Bauch.


# Interne Ableitung – Fetales EKG (FEKG)

Bereiten Sie die Haut vor und platzieren Sie die Hautelektroden an der Beinplatte.

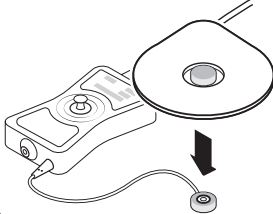

Positionieren Sie die Beinplatte unweit des Leistenkanals. Applizieren Sie die fetale Kopfschwartenelektrode gemäß Herstellervorgaben.

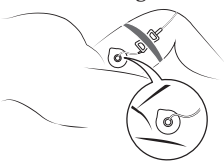

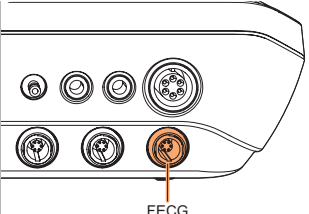


FEKG


Verbinden Sie den FEKG-Anschluss mit dem STAN S41.


## ST-Analyse

**ST-Ereignis**




**TQR/S-Verlauf**

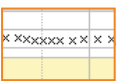

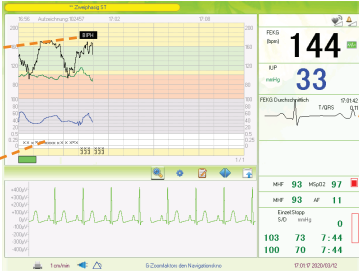



**FEKG-Durchschnitt**



## Marker für Ereignisse/Kindsbewegungen


Drahtgebundener Marker für Ereignisse/Kindsbewegungen.

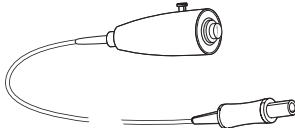

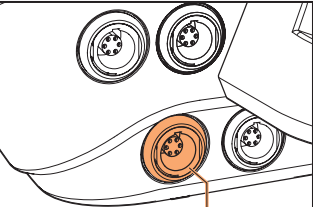

FM


Verbinden Sie den Marker für Ereignisse/Kindsbewegungen mit dem STAN S41.

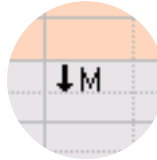


Darstellung des Ereignisses/der manuellen Kindsbewegung auf dem Bildschirm.

## Maternale Parameter – MSpO2

Applizieren Sie den MSpO2-Sensor (mit der Nagelmarkierung zur Nagelseite) am Zeigefinger der Patientin.

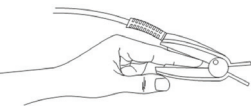


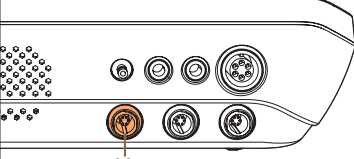


SpO2


Verbinden Sie das Kabel des MSpO2-Sensors mit dem STAN S41.

**MHF- und MSpO2-Werte.**

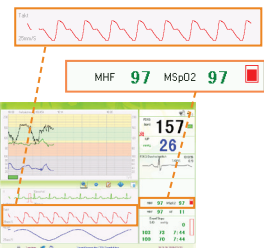


# Maternale Parameter – NIBP



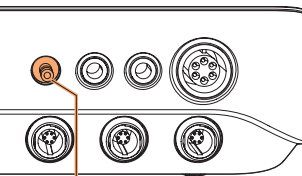


NIBP  
Verbinden Sie die Blutdruckmanschette mit dem STAN S41.



NIBP

Drücken Sie die NIBP-Taste, um die Messung zu starten.




NIBP-Menü

Auswahl Modus Blutdruckmessung

Auto (2:00) Auto (5:00) Auto (10:00) Auto (15:00) Auto (30:00)

Einzel STAT Automodus beenden Abbrechen


Wählen Sie im Popup-Menü den gewünschten Modus aus.

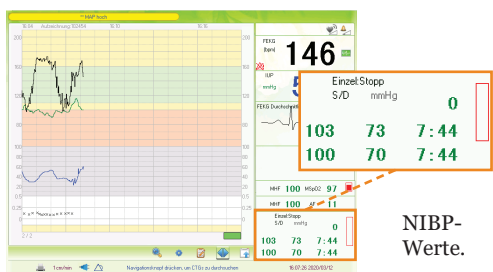


NIBP-Werte.


Einzel Stopp S/D	0	
103	73	7:44
100	70	7:44

# Maternale Parameter – MEKG und Atemfrequenz

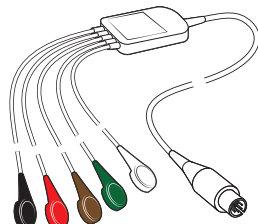

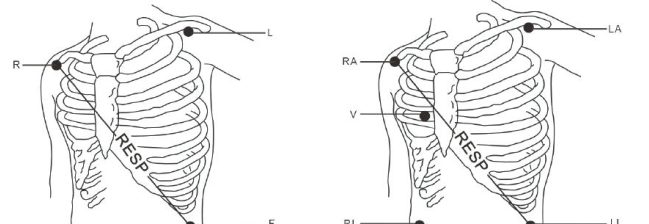


Positionierung der Elektroden für eine 3- bzw. 5-Kanal-EKG Ableitung.

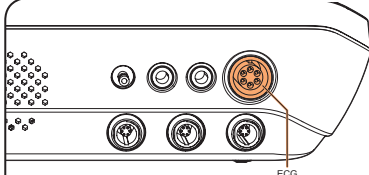

ECG

Verbinden Sie das MEKG-Kabel mit dem EKG-Anschluss am STAN S41.

MEKG- und Atemfrequenzwerte.

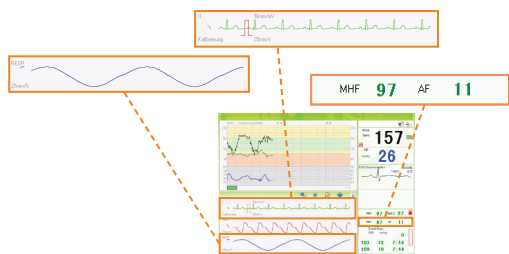

MHF 97 AF 11

157  
26

# Bedienung des STAN S41

**Anzeige-modus ändern**  
**Öffnen des Ereignisprotokolls**  
**Menüschaltfläche Extras**  
**Menü Schnelleinstellungen**  
**Scrollen im CTG-Fenster**

**Schnelleinstellungen. Die im Dialogfenster „Schnelleinstellungen“ vorgenommenen Einstellungen gelten nur für die aktuelle Aufzeichnung.**

**Drücken Sie die Funktionstaste „BED“.** Der Bildschirm Schnelleinstellungen wird angezeigt.  
**ODER**  
**Wählen Sie „Schnelleinstellungs-menü“.**

**Der Zugriff auf die Einstellungen erfolgt über das Menü „Extras“.**

**Fenster: Ereignisprotokoll Zum Hinzufügen von Anmerkungen/ Ereignissen & zur Überprüfung von Alarmsituationen.**

**Um die Ergebnisse der automatisierten CTG-Analyse zu überprüfen, wählen Sie „Analyseergebnis“ im Menü Extras aus.**

Aufz. Ergeb. CTG-Analyse: 0044	Startzeit	Intervalllänge	STV (ms)
8:50 - 9:12	08:50:16	0:22:00	8.12
8:50 - 9:00			9.77
8:50 - 9:02			9.77
8:50 - 9:04			9.77
8:50 - 9:06			9.77
8:50 - 9:08			11.61
8:50 - 9:10			9.67

**Um Patienteninformationen einzugeben, wählen Sie „Patienteninformationen“ im Menü Extras aus.**

**CE 0123** **Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.** **Verkauf, Service und Support** **Neoventa Medical AB**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District, GuangShanEr Road, Guangzhou, VR China  
 PLZ: 510520  
 Tel.: +86-20-87036513  
 Website: www.sunray.cn  
 Norra Ågatan 32, SE-431 35 Mölndal, Schweden  
 Tel.: +46 31 758 32 00  
 Website: www.neoventa.com  
**Technischer Support**  
 Tel.: +46 31 758 32 12  
 E-Mail: ts@neoventa.com