


Hurtigveiledning

Denne hurtigveiledningen erstatter ikke bruksanvisningen.

Starte en registrering

Trykk på av/på-knappen.

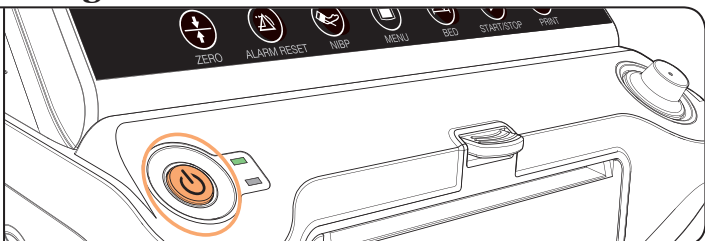

Trykk på og hold «START/STOP» for å starte, stoppe og pause registrering.

Trykk på tasten «PRINT» for å starte og stoppe utskrift. Retrospektive utskrifter er mulig.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Trykk på tasten «ALARM RESET» for å bekrefte pågående alarmer.

Trykk på og hold inne «MENU»-tasten noen sekunder for å låse/låse opp berøringsskjermen.

Ekstern registrering – TOKO

Plasser TOKO over fundus.

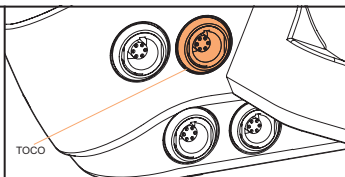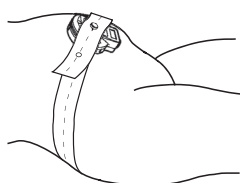


Koble TOKO-transduseren til STAN S41.




ZERO

Trykk på «ZERO»-tasten mellom riene for å nullstille TOKO-signalet.


Ekstern registrering – ultralyd

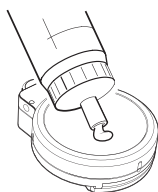

Påfør ultralydgelé på ultralydtransduseren.

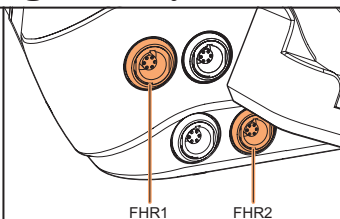


Koble ultralydtransduserne til STAN S41.

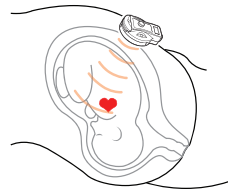



Plasser transduseren på mors abdomen.

Intern registrering – foster-EKG (FEKG)

Klargjør huden og sett på hudelektroden med den vedlagte lærplaten.

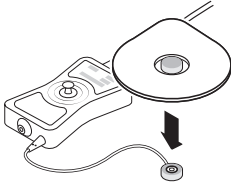

Plasser lærplaten nær lysken. Plasser fosterskalpelektroden i henhold til produsentens instruksjer.

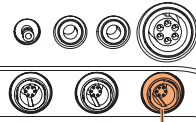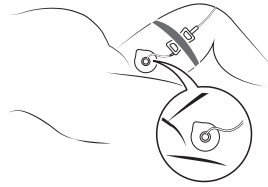

FEKG



Koble FEKG-kontakten til STAN S41.

ST-analyse

ST-hendelse



TQR/S-forhold

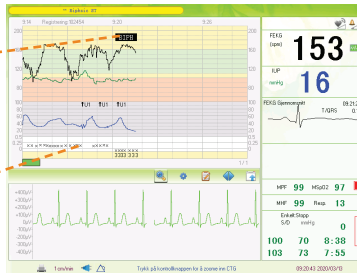
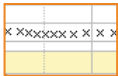


FEKG-middelverdi




Fosterbevegelsesmarkør

Kablet fosterbevegelsesmarkør.

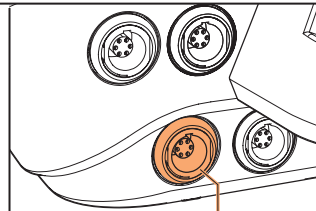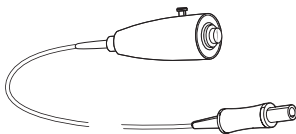

FM



Koble den kablede fosterbevegelsesmarkøren til STAN S41.

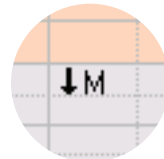

Fosterbevegelsesmarkør i skjermbildet.

Maternell parameter – MSpO2


Bruk MSpO2-sensoren på pasientens pekefinger med neglemerkingen på neglesiden.

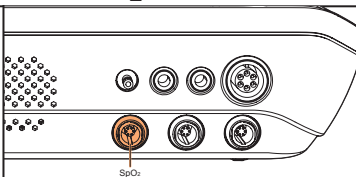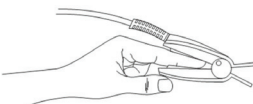


SpO2


Koble SpO2 til STAN S41.

MPF- og MSpO2-verdier.

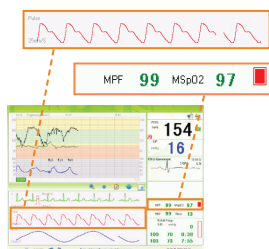


Maternelle parametre – NIBP

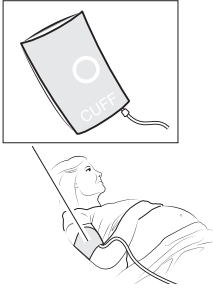

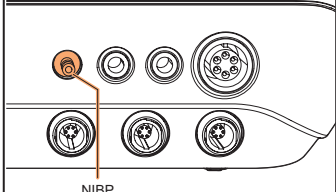

NIBP

Koble blodtrykksmansjetten til STAN S41.



NIBP

Trykk på NIBP-berøringstasten for å starte målingen.


NIBP-meny

Velig metode for blodtrykksmåling

Auto (2:00) **Auto (5:00)** Auto (10:00) Auto (15:00) Auto (30:00)


Enkelt STAT Stopp automodus Avbytt


Velg ønsket målemodus i hurtigtmenyen.

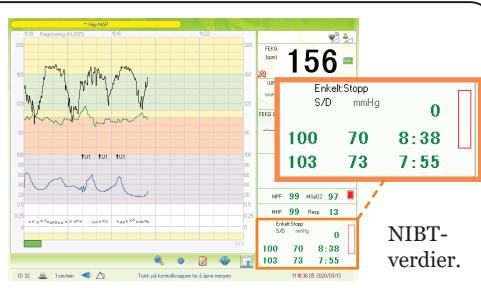


NIBP-verdier.

Maternelle parametere - MEKG og respirasjonsfrekvens

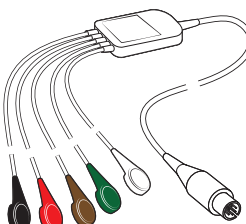

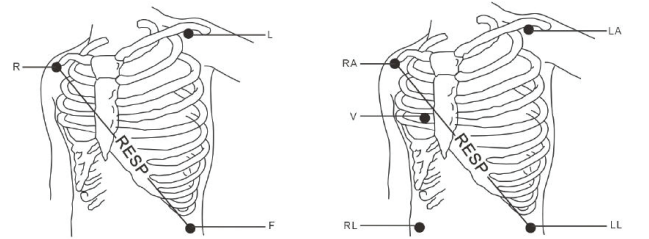


Modus for elektrodeplassering for 3- hhv. 5-ledet-pasientkabel.

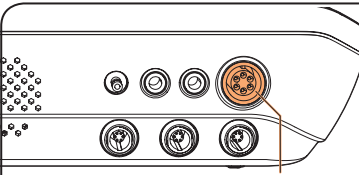


EKG

Koble MEKG-pasientkabelen til EKG-kontakten på hovedenheten.

MEKG- og respirasjonsfrekvensverdier.

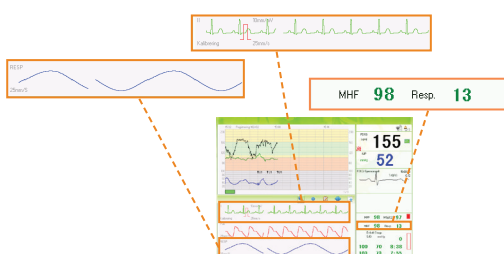


Betjening av enheten

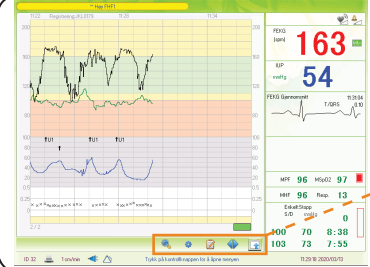

Endre visningsmodus Åpne hendelsesloggen Verktøyemeny-knapp

Hurtiginnstillingsmeny Rulle i CTG-vinduet


Hurtiginnstillinger. Innstillinger som er foretatt i dialogen for hurtiginnstillinger gjelder kun den gjeldende registreringen.

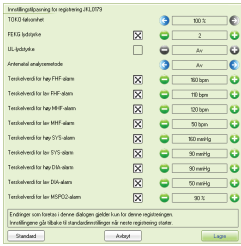


Trykk på «BED»-tasten. Skjerm-bildet Hurtiginnstillinger vises.

ELLER


Velg «Hurtiginnstillingsmeny».




Få tilgang til innstillinger ved hjelp av verktøyemenyen.

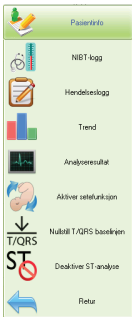


Hendelseslogg-vindu. For å legge til og granske alarmtilstander og notater.

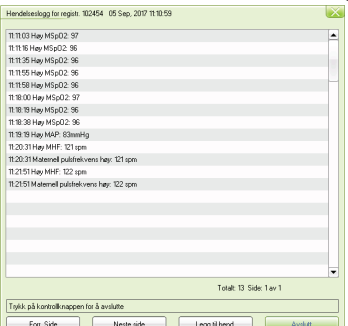

For å se på resultatet av den automatiserte CTG-analysen trykker du på «Analyseresultat» i verktøyemenyen.



Du legger inn pasientinformasjon ved å trykke på «Pasientinformasjon» i verktøyemenyen.

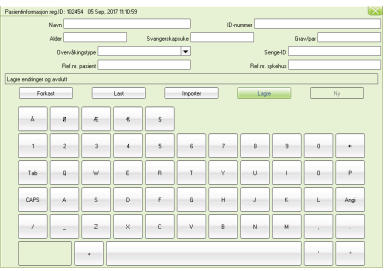

Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd. Salg, service Neoventa Medical AB og brukerstøtte

38 Gaokao Road, Gaotang Industry District, GuangShanEr Road, Guangzhou, Folkerepublikken Kina, Postnr.: 510520

Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Sverige

Tlf.: +86-20-87036513 Tlf.: +46 31 758 32 00

Hjemmeside: www.sunray.cn Hjemmeside: www.neoventa.com

Tekniker brukerstøtte

Tlf.: +46 31 758 32 12

E-post: ts@neoventa.com

Sunray Hurtigveiledning for STAN S41 – P2263-11088 **neoventa** It's all in the beat

Rev. CE1.4 – Mai 2020