


Guia Rápido

Este Guia Rápido não substitui as Instruções de Utilização.

Iniciar um registo

Pressione o botão de alimentação.

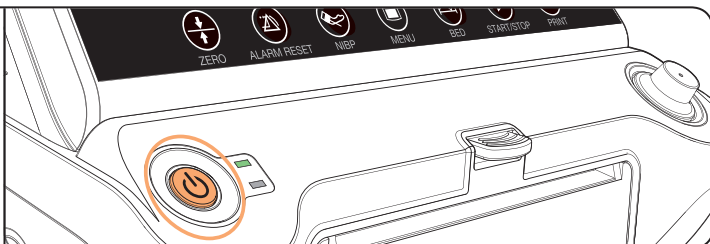

Prima e mantenha premeida a tecla "START/STOP" para iniciar, parar e pausar os registos.

Pressione a tecla "PRINT" para iniciar e parar a impressão. É possível efetuar a impressão retrospectiva.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Pressione a tecla "ALARM RESET" para confirmar os alarmes em andamento.

Pressione e segure a tecla "MENU" por alguns segundos para bloquear/desbloquear a tela sensível ao toque.

Registo externo - TOCO

Coloque o TOCO sobre o *fundus*.

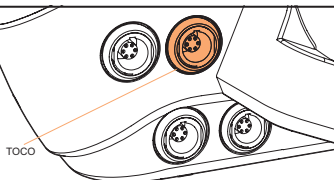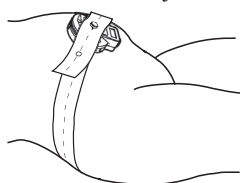

Ligue a sonda TOCO ao STAN S41.




ZERO

Para colocar o sinal TOCO a zero, pressione a tecla tátil "ZERO" entre contrações.

Registo externo - Ultrassons


Aplique gel para ultrassons na sonda de ultrassons.

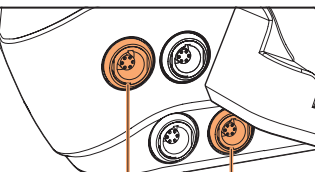

FHR1

FHR2


Ligue as sondas de ultrassons ao STAN S41.

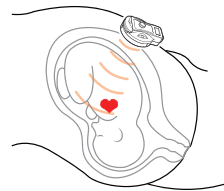

Coloque a sonda no abdómen materno.


Registo interno - ECG fetal (FECG)


Prepare a pele e aplique o eletrodo cutâneo com a placa de perna instalada.

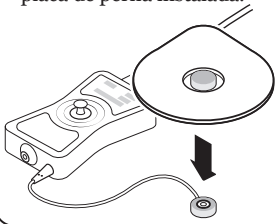

Coloque a placa de perna junto ao canal inguinal.

Aplique o eletrodo de escalpe fetal de acordo com as instruções do fabricante.

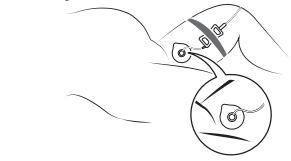

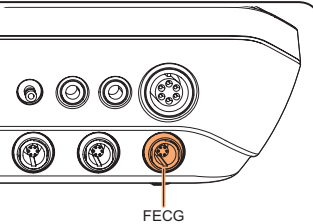


FECG


Ligue o conector FECG ao STAN S41.


Análise ST

Evento ST




Relações TQR/S



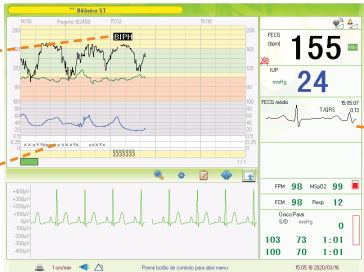



FECG médio



Marcador de movimentos fetais


Marcador de movimentos fetais com fios.

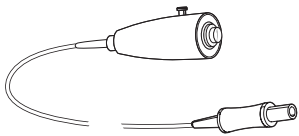

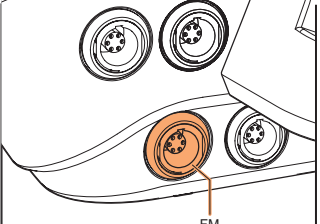

FM


Ligue o marcador de movimentos fetais com fios ao STAN S41.

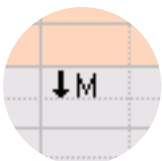


Marca de movimento fetal no ecrã.

Parâmetro materno - MSpO2

Aplique o sensor MSpO2 no dedo indicador da paciente com a marca da unha virada para o lado da unha.

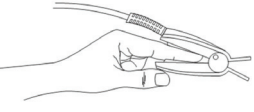


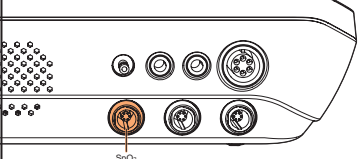


SpO2


Ligue o cabo SpO2 ao STAN S41.

Valores de FCM e MSpO2.

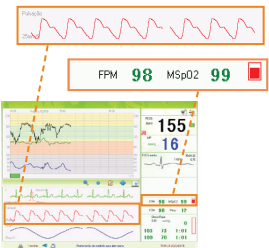


Parâmetros maternos - NIBP

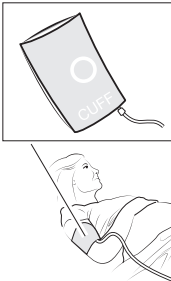

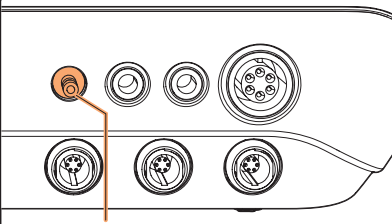

NIBP
Ligue a braçadeira NIBP ao STAN S41.



Prima a tecla tátil NIBP para iniciar a medição.

Selecione o modo de medição da pressão arterial

Auto (2:00)
Auto (5:00)
Auto (10:00)
Auto (15:00)
Auto (30:00)


Único
STAT
Parar modo automático
Cancelar


Selecione o modo de medição pretendido no menu pop-up.




Valores de NIBP.

Parâmetros maternos - MECG e ritmo respiratório

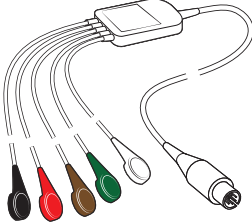

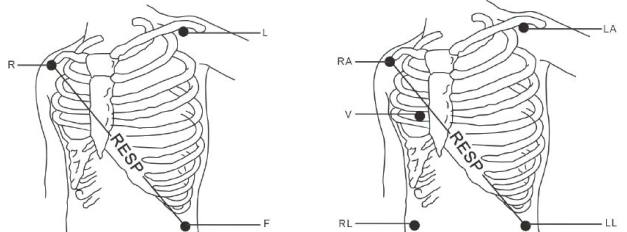


Colocação do elétrodo no modo de 3 e 5 cabos condutores, respetivamente.

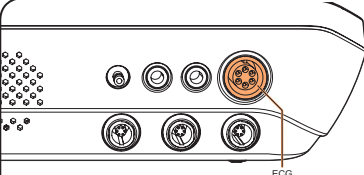

Ligue o cabo condutor MECG ao conector ECG da unidade principal.

Valores de MECG e ritmo respiratório.

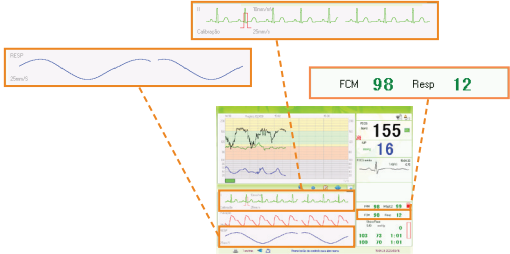

Funcionamento do dispositivo

Mudar modo de visualização Abrir o registo de eventos Botão do menu de ferramentas

Menu de configurações rápidas Percorrer a janela de CTG

Definições rápidas. As definições feitas no diálogo de definições rápidas aplicam-se apenas à gravação atual.

OU

Selecione "Menu de configurações rápidas".

Aceda às definições utilizando o menu "Ferramentas".

Janela de registo de eventos. Para adicionar e rever condições de alarme e anotações.

Para rever os resultados da análise automática de CTG, prima "Resultado da análise" no menu de ferramentas.

Registo result. de anal. CTG: 0044	Hora de início (H:MM)	Resultado
8:50 - 9:08	05:50 IS	11:68
8:50 - 9:00	05:50 IS	9:77
8:50 - 9:02		9:77
8:50 - 9:04		9:77
8:50 - 9:06		9:77

Para introduzir informações da paciente, prima "Informações da paciente" no menu de ferramentas.



Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.
 38 Gaokou Road, Gaotang Industry District,
 GuangShanEr Road, Guangzhou,
 República Popular da China, Código postal: 510520
 Tel.: +86-20-87036513
 Web site: www.sunray.cn

Vendas, manutenção e assistência

Neoventa Medical AB
 Norra Ägatan 32, 431 35 Mölndal, Suécia
 Tel.: +46 31 758 32 00
 Web site: www.neoventa.com
Apoio técnico
 Tel.: +46 31 758 32 12
 E-mail: ts@neoventa.com

