


## Guía rápida

La presente guía rápida no reemplaza las instrucciones de uso.

### Inicio de un registro

Pulse el botón de encendido.

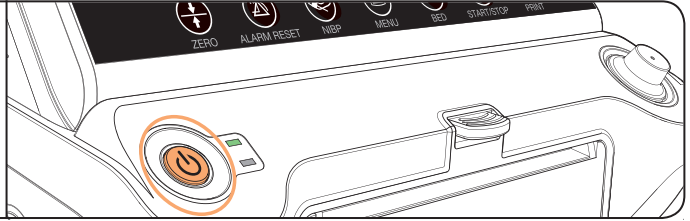

Pulse y mantenga presionada la tecla "START/STOP" para iniciar y detener o pausar los registros.

Presione la tecla "PRINT" para iniciar y detener la impresión. Es posible la impresión retrospectiva.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Presione la tecla "ALARM RESET" para confirmar las alarmas en curso.

Mantenga presionada la tecla "MENU" durante unos segundos para bloquear o desbloquear la pantalla táctil.

### Registro externo - TOCO

Coloque el TOCO sobre el fondo uterino.

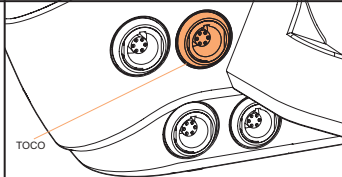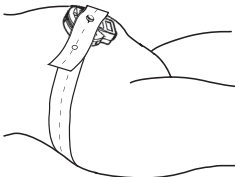

Conecte el transductor TOCO a STAN S41.




ZERO

Para poner a cero la señal TOCO, pulse la tecla táctil "ZERO" entre contracciones.


### Registro externo - Ultrasonido



Ponga gel para ultrasonidos en el transductor ultrasónico.

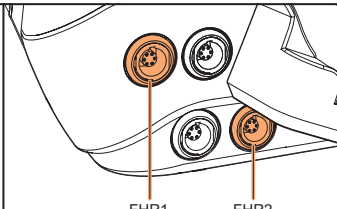


Conecte los transductores ultrasónicos a STAN S41.

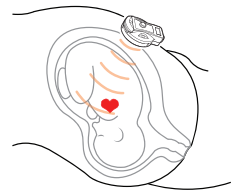



Coloque el transductor en el abdomen materno.

## Registro interno - ECG fetal (FECG)

Prepare la piel y coloque el electrodo cutáneo con la placa de pierna unida.

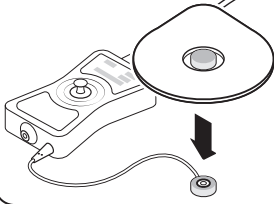

Coloque la placa de pierna cerca del canal inguinal.  
Coloque el electrodo del cuero cabelludo del feto según las instrucciones del fabricante.

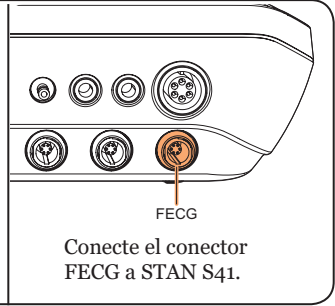
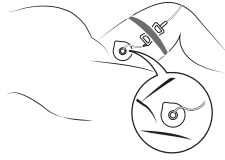


## Análisis ST

Evento ST



Relaciones TQR/S

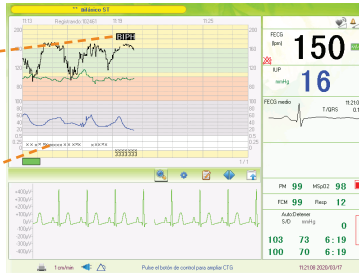
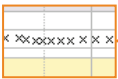


FECG medio




## Marcador de movimientos fetales

Marcador de movimientos fetales con cable.

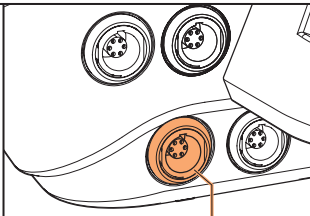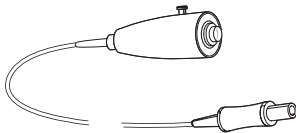



Conecte el marcador FM de movimientos fetales con cable a STAN S41.

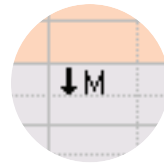

Marca de movimientos fetales en la pantalla.


## Parámetros maternos - MSpO2

Coloque el sensor de MSpO2 en el dedo índice del paciente con la marca de la uña mirando hacia el lado de la uña.

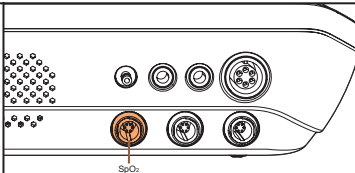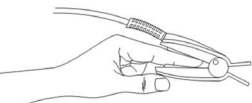



Conecte el SpO2 a STAN S41.

Valores de PM y MSpO2.

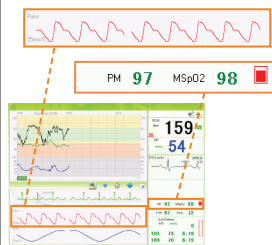


# Parámetros maternos - PANI

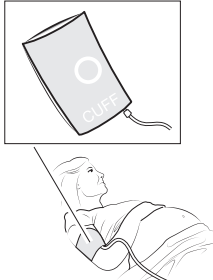

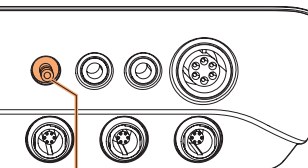

NIBP

Conecte el manguito de PANI al STAN S41.




NIBP

Pulse la tecla táctil NIBP para iniciar la medida.

Menú de PANI


Seleccionar el modo de medición de la presión arterial


Seleccione el modo de medida que desee en el menú emergente.

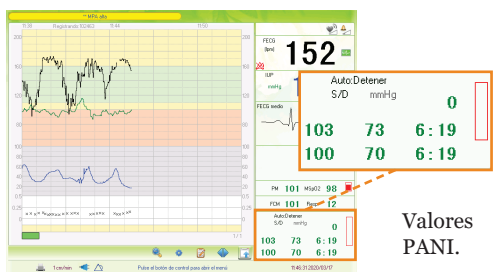


Valores PANI.

# Parámetros maternos - MEOG y frecuencia respiratoria

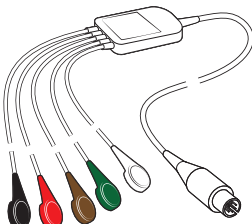

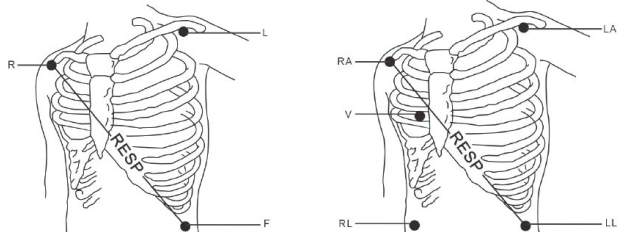


Ubicación de electrodos para el modo de 3 y 5 derivaciones.

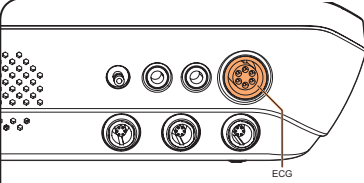


ECG

Conecte el cable MEOG al conector ECG en la unidad principal.

Valores de frecuencia respiratoria y MEOG.

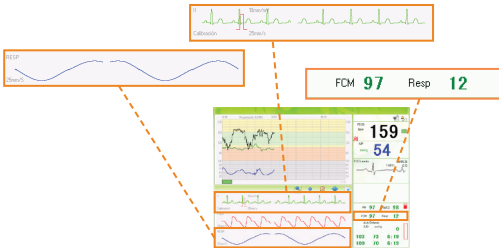


# Uso del dispositivo

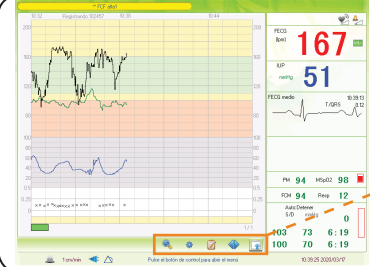

**Cambiar modo de visualización**  
**Uso del registro de eventos**  
**Botón de menú de herramientas**

**Menú de ajustes rápidos**  
**Ventana de desplazamiento por CTG**


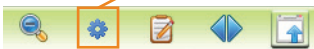
**Ajustes rápidos.**  
 Los ajustes realizados en el cuadro de diálogo de ajustes rápidos solo se aplican al registro actual.



**Pulse la tecla táctil "BED".**  
 Aparecerá la pantalla de ajustes rápidos.

Y


Seleccione "Menú de ajustes rápidos".


Acceda a la configuración con el menú "Herramientas".



Ventana de registro de eventos. Para añadir y revisar condiciones y anotaciones de alarmas.

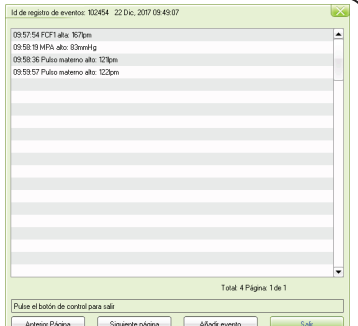


Para revisar los resultados del análisis de CTG automatizado, pulse "Resultado de análisis" en el menú de herramientas.

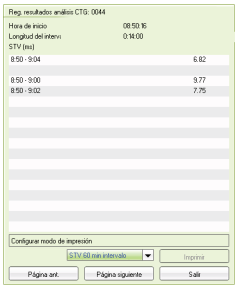

Reg. resultados análisis CTG: 0044	Hora de inicio	Longitud del intervalo (STG) (min)
	08:50:16	0:10:00
8:50 - 9:04		6:82
8:50 - 9:00		9:77
8:50 - 9:02		7:75

Para acceder a información de la paciente, pulse "Información del paciente" en el menú de herramientas.

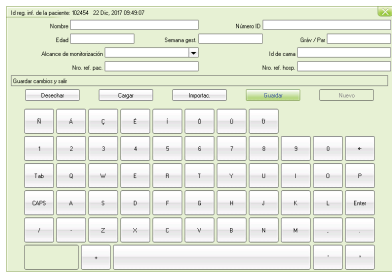


**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaokou Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 República Popular China, C.P.: 510520  
 Tel.: +86-20-87036513  
 Sitio web: www.sunray.cn

**Ventas, servicio y soporte**  
**Neoventa Medical AB**  
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Suecia  
 Tel.: +46 31 758 32 00  
 Sitio web: www.neoventa.com  
**Soporte técnico**  
 Tel.: +46 31 758 32 12  
 Correo electrónico: ts@neoventa.com

