


Quick Guide

Denna Quick Guide ersätter inte bruksanvisningen.

Starta en registrering

Tryck in strömknappen.

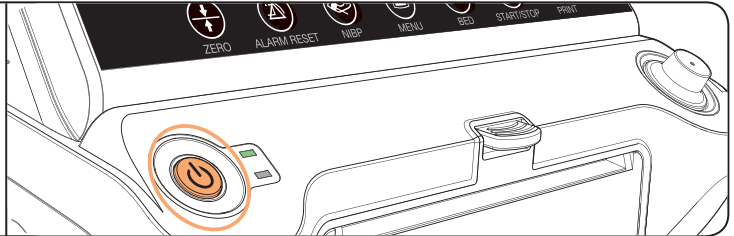

Tryck och håll in touchtangenten "START/STOP" för att starta, avsluta och pausa registreringar.

Tryck på knappen "PRINT" för att starta och avsluta utskrift. Retrospektiv utskrift är möjlig.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Tryck på knappen "ALARM RESET" för att bekräfta pågående larm.

Tryck in och håll ned knappen "MENU" i några sekunder för att låsa/låsa upp pekskärmen.

Extern registrering - TOKO

Placera TOKO-givaren över fundus.

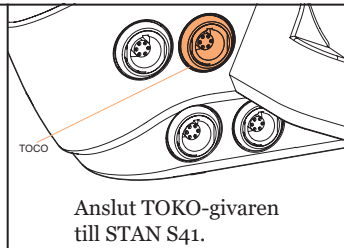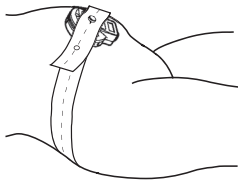

Anslut TOKO-givaren till STAN S41.




ZERO

För att nollställa TOKO-signalen, tryck touchtangenten "ZERO" mellan kontraktionerna.

Extern registrering - Ultraljud

Applicera ultraljudsgel på ultraljudsgivaren.

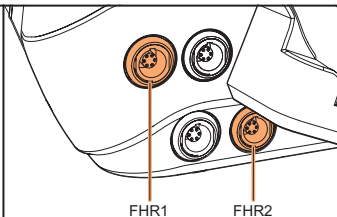


Anslut ultraljudsgivaren till STAN S41.



Placera givaren på mammans buk.


Övervaka fosterhjärtfrekvens med skalpelektrod

Preparera huden och applicera hudelektroden med fastsatt benplatta.

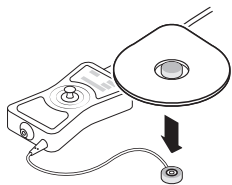

Placera benplattan nära inguinalkanalen.

Applicera skalpelektroden i enlighet med tillverkarens instruktioner.

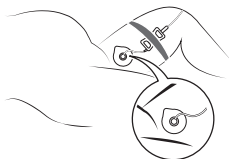

FECG

Anslut FEKG-givaren till STAN S41.


ST-analys

ST-händelse



TQR/S-värden

X	X	X	X	X	X	X	X


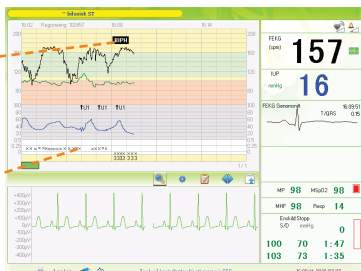


FEKG-medelvärde




Fosterrörelsemarkör

Trådbunden fosterrörelsemarkör.

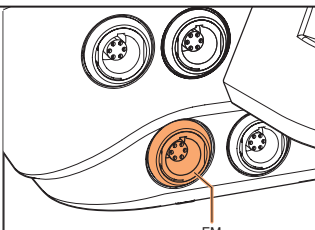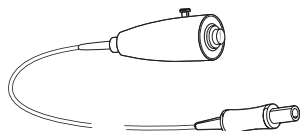

FM



Anslut den trådbundna fosterrörelsemarkören till STAN S41.

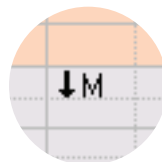

Fosterrörelsemarkören på skärmen.

Mammaparameter - MSpO2

Placera MSpO2-givaren på patientens pekfinger med nagelmarkeringen vänd mot nagelns sida.

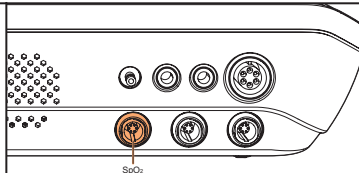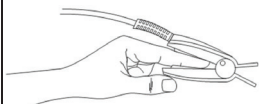


SpO2

Anslut MSpO2-givaren till STAN S41.


Mammapuls & MSpO2-värden.




MP 99 MSpO2 98

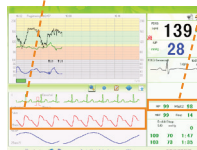


Mammparametrar - blodtryck (NIBP)

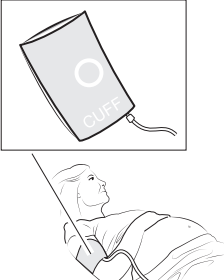

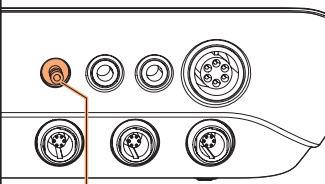

NIBP

Anslut blodtrycksmanschetten till STAN S41.



NIBP

Tryck på touchtangenten “NIBP” för att starta mätningen.



Välj metod för blodtrycksmätning

Auto (2.00) Auto (5.00) Auto (10.00) Auto (15.00) Auto (30.00)

Enskild STAT Stoppe autoläge Avbyt


Välj önskad mätning i pop-up-fönstret.




Blodtrycks-värden.


Enskild/Stoppe S/D		
mmHg	mmHg	mmHg
100	70	1:47
103	73	1:35

Mammparametrar - Maternellt EKG & Andningsfrekvens

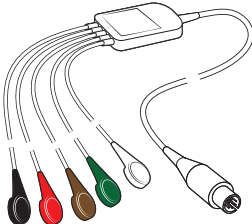

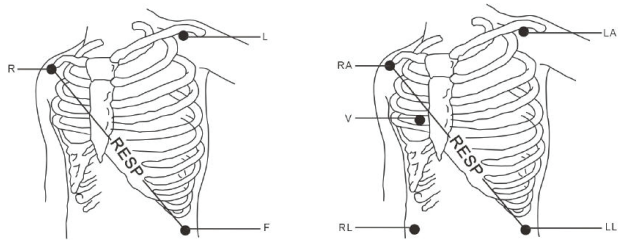


Placering av elektroder för 3- respektive 5-avledningslägen.

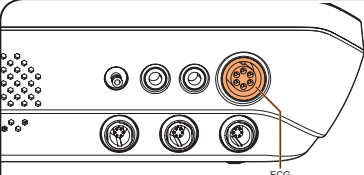

EGG

Anslut MEKG-avledningskabel till EKG-anlutningen på huvudenheten.

MEKG- och andningsfrekvens-värden.

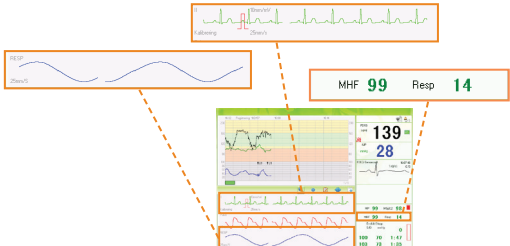

MHF 99 Resp 14

Användning av enheten

Ändra visningsläge Öppna händelseloggen Verktymsmeny-knapp

Åtkomst till snabbinställningsmenyn Bläddra i CTG-fönstret

Snabbinställningar. Inställningarna som görs i dialogrutan för snabbinställningar gäller endast den aktuella registreringen.

Tryck på touchtangenten "BED". Skärmen för snabbinställningar visas.

ELLER

Välj "snabbinställningsmenyn"

Åtkomst till inställningar med hjälp av verktymsmeny.

Händelseloggens fönster, för att lägga till och granska alarm och notat.

För att granska resultat av automatiserad CTG-analys, tryck på "Analysresultat" i verktymsfältet.

Starttid	08:50:16	10:10
Intervalltid	0:24:00	
5:50 - 9:14		10:10
9:50 - 9:50	9:57	
9:50 - 9:02	9:57	
9:50 - 9:04	9:57	
9:50 - 9:06	9:57	
9:50 - 9:08	11:51	
9:50 - 9:10	9:57	
9:50 - 9:12	9:57	

För att mata in patientinformation, tryck på "Patientinformation" i verktymsfältet.

CE 0123 Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd. **Försäljning, service och support** Neoventa Medical AB
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District, Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Sverige
 GuangShanEr Road, Guangzhou, Folkrepubliken Kina, Postnummer: 510520 Tfn: +46 31 758 32 00
 Tfn: +86-20-87036513 Webbplats: www.neoventa.com
 Webbplats: www.sunray.cn Tfn: +46 31 758 32 12
 E-post: ts@neoventa.com

